

AM-1 刺鍼トレーニングパッド



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ INDEX －

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容／使用手順 2
- 取扱上の注意／保管方法 3

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



SH-1

はじめに

この度は弊社商品 刺鍼トレーニングパッド をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ


はじめに／もくじ	1
目的／内容／使用手順	2
取扱上の注意／保管方法	3

目的

刺鍼練習一押手、刺手、直刺、斜刺

内容

- 1 本体 5個
- 2 装着用ベルト 5本

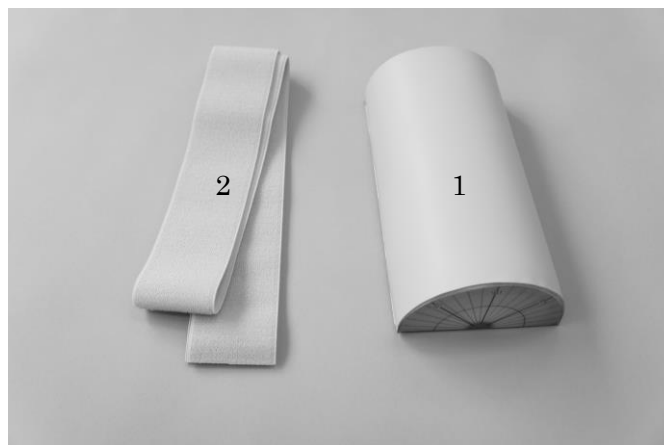

使用手順

- 1 一人でされる場合は本体を机上に設置し、2人一組でされる場合は、装着用ベルトを手技したい位置に巻いてください。
- 2 本体をベルトにセットしてください。
- 3 手技を開始してください。

取扱上の注意

- 1 本商品で刺鍼の実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。
表皮やセンサーの劣化につながる恐れがあります。
- 2 材質上、汚れが付きやすいので取扱いにはご注意ください。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 3 落とすと壊れますので、取り扱いには十分注意して下さい。
- 4 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取って下さい。
(ベンジン、シンナー、磨き粉等の溶剤は使用しないで下さい。)
- 5 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡下さい。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

保管方法

- 1 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取って下さい。
- 2 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所を避けて保管して下さい

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------