

M100-5 小春さん



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ I N D E X －

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●保管方法	4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M100-5

はじめに

この度は弊社商品 小春さん をご購入頂きまして

誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを

よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品

到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い

か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
保管方法	4


目的

下記項目の介護実習が可能

- 体位変換
- 入浴
- 排泄・摘便
- 口腔ケア
- 車椅子介助

内容

1	本体	1体
2	寝衣	1着
3	ベビーパウダー	1個

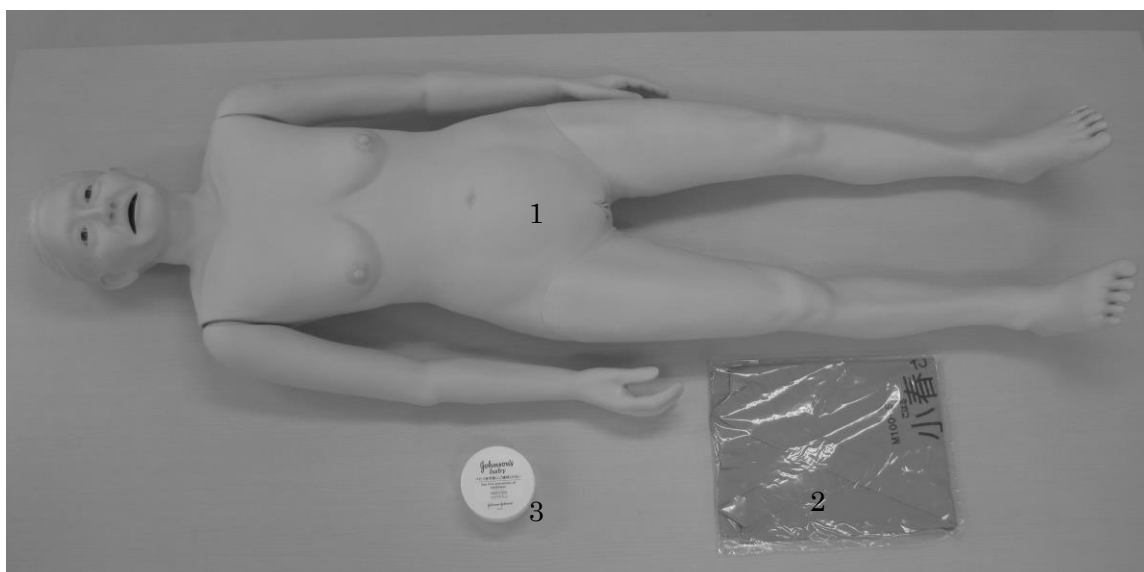

取扱上の注意

- 1 モデルはシリコン製につき、汚れ、しみ等がつきやすいので、新聞、印刷物の上に置かないでください。皮膚の汚れは、中性洗剤、アルコール系薬剤で、軽く拭き取る程度で処置してください。
- 2 油性のマジックやインクは、皮膚にしみこんで取れなくなりますのでモデルに使用しないでください。
- 3 運搬は慎重になさってください。キズがついたり破れたりしますと、防水効果が損なわれます。
- 4 骨格や関節は無理にねじったり、可動域以上に動かさないで優しく扱ってください。無理な関節の動きをさせると破損の原因となります。



- ① 手首を曲げたり回したりするときには、人間の可動域の範囲内で行ってください。曲げすぎたり回しすぎたりすると手首のつなぎ目が裂けることがあります。
 - ② 首は、前後左右に動きますが動作域を超えるほど力を加えないでください。
 - ③ 手の指の関節は、細く精巧に作られていますので人間の可動域の範囲内で丁寧に扱ってください。
 - ④ 義歯を取り出す時、また入れる時は唇に当たってキズがつかないように口を十分広げるようにしてください。
- 5 モデルにベタつき等がでている場合は、付属のパウダーを軽く塗布してください。そのままご使用になられると破損の恐れがあります。
 - 6 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
 - 7 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
 - 8 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 入浴実習の後では、よく水分を拭き取り、ベビーパウダーを軽くかけてください。
- 2 肛門内部には水分が残りやすくなっていますので拭き取った後、保管して下さい。
- 3 汚れた時は、柔らかい布に中性洗剤を染み込ませ拭き取ってください。
その後、水拭きしてください。その後、水分を乾いた布でふきとり
ベビーパウダーを塗布してください。
- 4 寝衣を着た状態で保管しますと、シリコン剤がにじみ出て寝衣に
シミが付くことがありますのでご了承ください。
- 5 保管される際には、各関節を伸ばした状態で横にし、保管してください。
複数台保管される際には、重ねずに1体ずつ保管してください。
- 6 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------