

M152-1 殿筋注射説明模型 Type II



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ I N D E X －

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順／保管方法	4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M152-1

はじめに

この度は弊社商品 殿筋注射説明模型 Type II をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4

目的


下記の筋肉注射実習が可能です。

1 殿部筋肉内注射の正誤判定

(四分三分法、クラークの点、ホッホシュテッターの部位)

内容

- | | | |
|---|---------------------|----|
| 1 | 本体(付属の排液バックを含む) | |
| 2 | 乾電池 (単3型アルカリ乾電池 4本) | 1組 |
| 3 | 側臥位用台座(2個組) | 1組 |
| 4 | 注射部位確認カバー | 1枚 |
| 5 | 排水用シリンジ | 1本 |

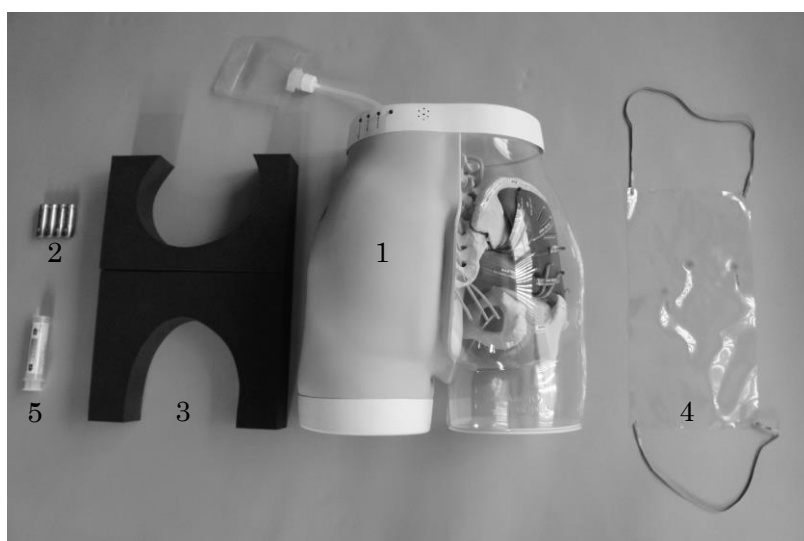

取扱上の注意


- 1 本商品で実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。
表皮やセンサーの劣化につながる恐れがあります。
- 2 実習の際には、水(水道水)のみ使用して下さい。
水以外の液体は使用しないでください。
- 3 落とすと壊れますので、取り扱いには十分注意してください。
- 4 透明部分には荷重を掛けないでください。破損の原因となります。
- 5 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。
(ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないで下さい。)
- 6 水を注入する場合は、緑色ランプの点灯の場合のみ注入できます。
それ以外の場合に水の注入は決してしないでください。
(赤色ランプの点灯やブザーが鳴っている場合には、決して水を注入
しないでください。液が排出されず、故障の原因となります。)
- 7 電池は単3型アルカリ乾電池4本をご使用ください。
取り付けは+、-に注意して入れてください。ブザー音が小さくなったり、
ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店まで
ご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での
同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 排水後は、立てた状態で保管してください。
- 2 排液バッグの水を捨てた後、ほとんどの水は排出されますが排液チューブ内の水分が気になる場合、付属の排水用シリンジを用いて排水できます。その後、殿部を上向きに置いて保管してください。
- 3 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 4 保管するときは、電池を必ず取り出してください。
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意ください。

使用手順

- 1 方向に注意しながら、電池ボックスに単3型アルカリ乾電池を4本入れてください。
- 2 電源スイッチをONにしてください。
- 3 伏臥位：殿部を上向きにして置いてください。
側臥位：付属の側臥位用台座にセットしてください。
(右図参照)

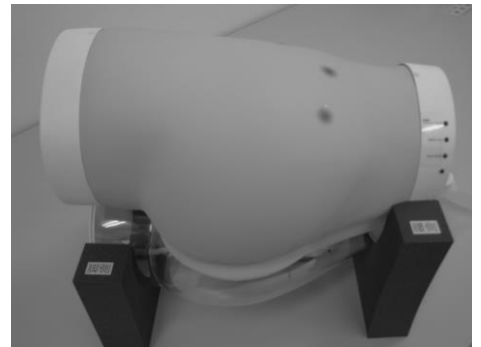

- 4 正しい注射部位を確認してください。
- 5 注射器に水を入れ、正しい部位に注射してください。
- 6 正しい部位に注射しますと、緑色ランプが点灯します。
その場合にのみ水を注入して殿部注射の練習ができます。
- 7 間違った部位に注射しますと、赤色ランプの点滅とブザーで警告して知らせます。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------