

# M152-3 サカモト殿筋注射トレーナー



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

## － I N D E X －

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順／保管方法	4

！  
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M152-3

## はじめに

---

この度は弊社商品 サカモト殿筋注射トレーナーをご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

## もくじ

---

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4

## 目的


下記の注射実習が可能

### 1 殿部筋肉内注射の正誤判定

(クラークの点・ホッホシュテッターの部位)

## 内容

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | 本体 (排液バッグ含む)           |     |
| 2 | 注射部位確認カバー              | 1 枚 |
| 3 | 排水用シリンジ                | 1 本 |
| 4 | 乾電池 (単 3 型アルカリ乾電池 4 本) | 1 組 |

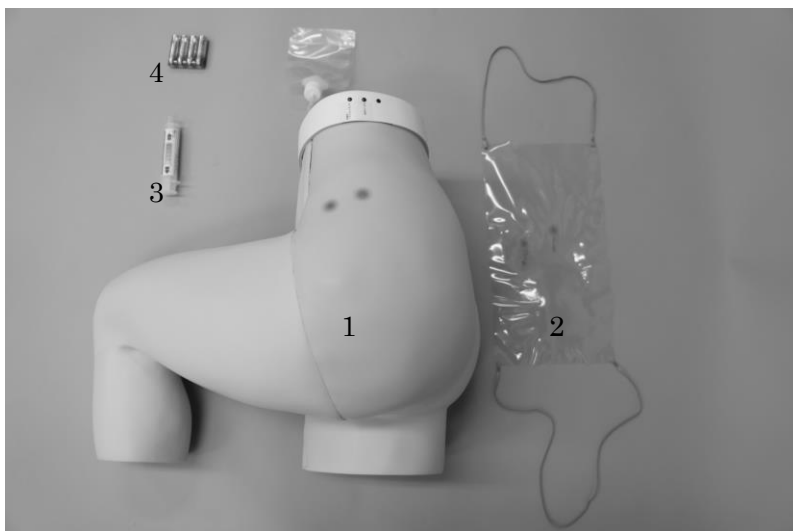

## 取扱上の注意

- 1 本商品で注射の実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。  
表皮の劣化につながる恐れがあります。
- 2 実習の際には、水（水道水）のみ使用して下さい。  
水以外の液体は使用しないで下さい。
- 3 水を注入する場合は、緑色ランプの点灯の場合のみ注入できます。  
それ以外の場合に水の注入はしないでください。
- 4 落とすと破損の恐れがありますのでご注意下さい。
- 5 汚れた場合には、柔らかい布に台所洗剤をつけて拭き取ってください。  
※ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないでください。
- 6 電池は単3型アルカリ乾電池4本をご使用ください。  
取り付けは+、-に注意して入れてください。ブザー音が小さくなったり、  
ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 7 本商品は四分三分法には対応しておりません。
- 8 使用上異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店まで  
ご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での  
同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

## 使用手順

- 1 始めに、本体に電池を入れてください。
- 2 本体スイッチをオンにしてください。
- 3 液を注入する場合は必ず水（水道水）をご使用ください。  
緑ランプ点灯のときのみ、水を注入することができます。
- 4 実習して下さい。
- 5 内蔵ランプとブザーで筋肉内注射の正誤を判定します。
  - ・深さを含めて正しい位置でできた場合、緑色ランプが点灯します。
  - ・注射部位に誤りがある場合は赤色ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
  - ・位置は正しいものの深過ぎた場合は、赤・緑両方のランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
- 6 実習後、排液バッグを根元から外し、中の水は捨てて保管してください。
- 7 チューブ内の水滴排出等、必要な際は排水用シリンジにて排水してください。

## 保管方法

- 1 排液バッグの水を捨てた後、ほとんどの水は排出されますが排液チューブ内の水分が気になる場合、付属の排水用シリンジを用いて排水できます。
- 2 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け保管してください。
- 3 模型を保管するときは、電池を必ず取り出してください。  
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意ください。

# 株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL <a href="http://sakamoto-model.co.jp">http://sakamoto-model.co.jp</a>
	E-Mail <a href="mailto:info@sakamoto-model.com">info@sakamoto-model.com</a>

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------