

M163 嚙下のメカニズム模型



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ I N D E X －

| | |
|-----------|---|
| ●はじめに／もくじ | 1 |
| ●目的／内容 | 2 |
| ●取扱上の注意 | 3 |
| ●使用手順 | 4 |
| ●保管方法 | 5 |

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

M163

はじめに

この度は弊社商品 嚙下のメカニズム模型をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検して下さい。

もくじ

| | |
|----------|---|
| はじめに／もくじ | 1 |
| 目的／内容 | 2 |
| 取扱上の注意 | 3 |
| 使用手順 | 4 |
| 保管方法 | 5 |


目的

下記の学習が可能

- 1 嚥下の仕組み
- 2 口腔内のケア

内容

- | | | |
|---|------------|----|
| 1 | 本体 | 1台 |
| 2 | 部位説明透明カバー | 1個 |
| 3 | 枕 | 1個 |
| 4 | 食塊模型(指示棒付) | 1本 |
| 5 | ベビーパウダー | 1缶 |


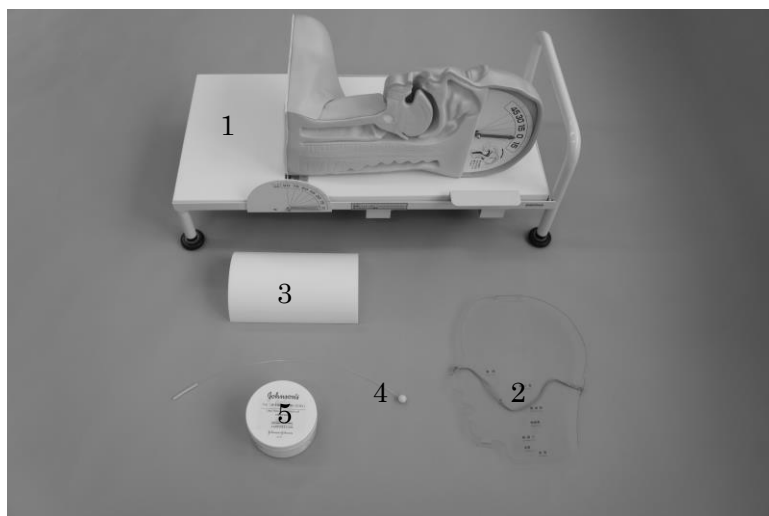


取扱上の注意

- 1 顔部、首部に樹脂製品が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意して下さい。
- 2 顔部、首部の材質上、汚れが付きやすいので取扱いにはご注意下さい。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意下さい。
- 3 顔部、首部の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いないで下さい。)
その後、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布して下さい。
- 4 無理な荷重をかけたり、落としたりすると破損の原因となります。
- 5 ベッドを移動する際は、決して本体片側のみを持って動かさないで下さい。
また、頭部角度および、ベッド角度を0°にし、頭部を寝かせてから移動して下さい。
詳しくは「使用手順」をご覧ください。
- 6 頭部をベッドから起こす時は、片手で後頭部、片手で胸部を持って起こして下さい。顔部や首部の柔らかい素材部分を持って行わないようご注意下さい。
詳しくは「使用手順」をご覧ください。
- 7 首部を曲げる際は、頭部を起こしてから行って下さい。片手で後頭部、片手であごを持って傾けて下さい。また、頭部角度針には触れないで下さい。
顔部や首部の柔らかい素材部分を持って行わないようご注意下さい。
詳しくは「使用手順」をご覧ください。
- 8 ベッドを傾ける際は頭部を起こしてから行って下さい。ベッド角度針には触れないで下さい。
詳しくは「使用手順」をご覧ください。
- 9 食塊模型は頭部口腔内、食道、気管内では過度に動かさないで下さい。
顔部の裂けなど故障の原因になります。
- 10 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡下さい。
- 11 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 12 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

使用手順

- 1 本体をハードケースから出し、滑りにくい机などに置いて下さい。
本体を取り出す際、両手でベッドの両側を持って行って下さい。
(決して片側のみを持って動かさないで下さい。)
- 2 頭部を固定しているテープを外し、頭部の袋を外して下さい。
- 3 頭部を起こして下さい。この際、片手で後頭部
片手で胸前部を持って行って下さい。
顔部や首部の柔らかい素材部分を持って行わないよう
ご注意ください。
- 4 首前は前に約 15 度、後ろに約 45 度曲げることができます。
片手で後頭部、片手であごを持って傾けて下さい。
首を曲げる際は、頭部を起こしてから行って下さい。
頭部角度針には触れないで下さい。
- 5 ベッドの角度は水平から 13 段階調節できます。
ベッド可動部裏側からストッパーを出し、任意の溝に
はめることにより角度を調節することができます。
ベッドを傾ける際は頭部を起こしてから行って下さい。
ベッド角度針には触れないで下さい。
- 6 頭部をベッドに寝かして実習を開始します。
- 7 再度、机上で移動する場合は、頭部角度、ベッド角度
を 0 度にし、頭部を寝かしてから行って下さい。
- 8 付属の透明部位カバーを用いることができます。
ゴムを頭部に巻いてご使用下さい。
- 9 付属の枕や食塊模型を用いることができます。
頭部を動かす際は十分ご注意ください。
食塊は頭部口腔内、食道、気管内では無理に動かさないで下さい。

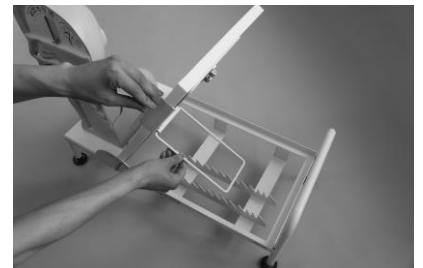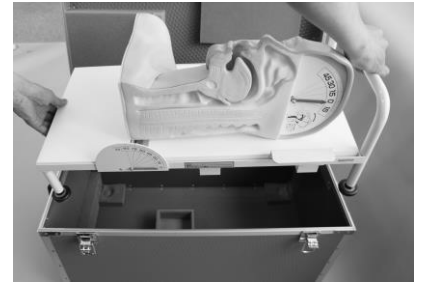

保管方法

- 1 顔部、首部の汚れは、中性洗剤を用いてやわらかい布で軽くふき取り、その後、水を含ませた布でふき取り、ベビーパウダーを塗布して下さい。
- 2 頭部角度、ベッド角度を0度にし、頭部を寝かしてから収納して下さい。
- 3 透明部位カバーを本体に取り付けたまま収納しないで下さい。
- 4 専用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管して下さい。

株式会社坂本モデル



| | |
|----|---|
| 本社 | 〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 |
| | Tel 075-701-1135 |
| | Fax 075-722-5638 |
| | URL http://sakamoto-model.co.jp |
| | E-Mail info@sakamoto-model.com |

| | |
|------|-----------------|
| 大阪工場 | 〒562-0035 |
| | 大阪府箕面市船場東1-9-29 |