

M167 サカモト気道管理トレーナー



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ I N D E X －

- | | |
|------------|---|
| ●はじめに／もくじ | 1 |
| ●目的／内容 | 2 |
| ●取扱上の注意 | 3 |
| ●使用手順／保管方法 | 4 |

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

はじめに

この度は弊社商品 サカモト気道管理トレーナーをご購入頂きまして、誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4

目的

下記の挿管実習が可能

- 1 経口による気管挿管
- 2 経鼻による気管挿管
- 3 片肺送気の確認
- 4 胃膨満の確認

内容

- | | | |
|---|---------|----|
| 1 | 本体 | 1体 |
| 2 | 交換用前歯 | 3本 |
| 3 | シリコンオイル | 1本 |
| 4 | ベビーパウダー | 1缶 |



取扱上の注意

- 1 頭部に樹脂製品が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意してください。また、頭部表皮は取り外しをしないでください。
- 2 頭部の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋の着用をお勧めします。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 3 頭部の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いないでください)
その後、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布してください。
- 4 前歯は強い衝撃を加えると、折れる構造になっております。
その際、口腔内に歯が落ちた場合ピンセットなどでつまんで取り除いてください。
- 5 チューブ等を本製品にご使用になられる際には付属のシリコンオイルを塗布して使用してください。

気管挿管チューブは **ID7.0～8.0** に対応しています。
- 6 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 7 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 8 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 本体をハードケースから出し、滑りにくい机などに置いて実習してください。
- 2 本体を汚さないようにするためにゴム手袋などをして実習してください。
- 3 チューブをご使用になる場合は付属のシリコンオイルを塗布してください。
- 4 挿管実習を開始してください。
- 5 あやまった手順の場合は前歯は折れる仕様になっております。
破損した場合、交換用パーツと取替え使用してください。
- 6 正しい挿管ができている場合は両肺が、不完全な場合は片肺が
食道挿管の場合は胃が膨らむ仕様になっております。

保管方法

- 1 顔部の汚れは、中性洗剤を用いてやわらかい布で軽くふき取り、
その後、水を含ませた布でふき取ってから付属のベビーパウダーを
軽く塗布してください。
- 2 専用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な部屋を避けて
保管してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035
	大阪府箕面市船場東1-9-29