

# M169

## 装着型摘便シミュレーター

- 重量/約4kg ●ケースサイズ/W55×D26×H27cm
- 付属品/装着用ベルト、模擬便、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納ケース
- 指導/田代ひろみ



### 実習

**模擬便のセット** 模擬便は簡単にセットでき、繰り返し使用できます。



1. 本体上部のキャップをはずします。左右のくぼみをつまみ引き抜くようにすると簡単にはずれます。



2. 模擬便を適度に取り本体内部(直腸部)に押し込むように挿入します。



3. キャップが本体の面とそろるように閉め、上部のロックを下ろしてください。

**簡単装着** ベルトで固定するだけで、簡単に装着できます。



装着型なので実際の体位をとって実習できます。二人一組またはグループ学習に適しています。

**殿部を取り出し洗浄できます。**



### 交換用パーツ

模擬便  
専用潤滑剤

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)