

M179 サカモトベビータッチ バイタルサインシミュレーター



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的	2
●内容	3
●取扱上の注意	4
●使用手順	5 - 6
●保管方法	7

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M179

はじめに

この度は弊社商品「サカモトベビータッチ」をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的	2
内容	3
取扱上の注意	4
使用手順	5、6
保管方法	7


目的

下記項目の実習が可能

- ・心音の確認
- ・腹部挙上による呼吸の確認
- ・脈拍の測定(橈骨動脈・頸動脈・浅側頭動脈を各左右6ヶ所と大泉門)
- ・体温計測(直腸)
- ・停留精巣の確認(陰嚢右は精巣有、左は無)

内容

1	人形部	1 体	6	専用産着	1 着
2	機械部	1 台	7	体温計	1 個
3	電源コード	1 本	8	聴診器	1 個
4	青赤コード	1 本	9	ベビーパウダー	1 缶
5	接続コード (黒)	1 本			

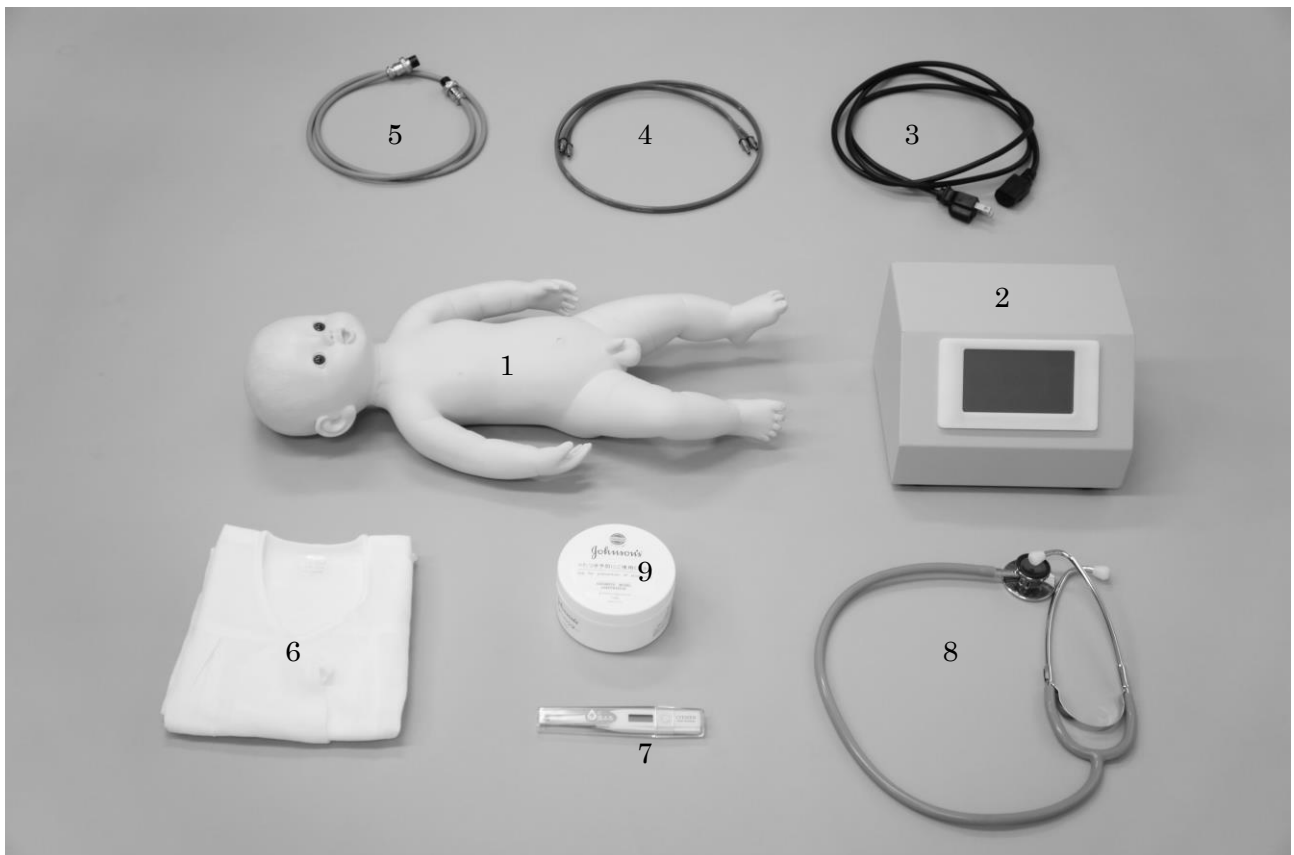



取扱上の注意

- 1 人形部はシリコン製ですので、直射日光や、高温・多湿の場所に保管すると、変形・変質することがありますので注意してください。
- 2 人形部はシリコン製につき、汚れ、しみ等がつきやすいので、新聞、印刷物などの上に置かないでください。
皮膚の汚れは、中性洗剤で、軽く拭き取る程度で処置してください。
その際、人形部のコード接続部に接触しないようご注意ください。
- 3 油性のマジックやインクは、皮膚にしみこんで取れなくなりますので使用しないでください。
- 4 無理な荷重をかけたり、落としたりすると破損の原因となります。
- 5 人形部、機械部は水をかけたり、浸したり（沐浴）しないでください。
- 6 タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペンなどの先のとがったもので操作しないでください。故障の原因となります。
- 7 電源コードは機械部背面のスイッチをオフにしてから、抜いてください。
故障の原因となります。
- 8 コードを無理に引き抜こうとしないでください。故障の原因となります。
- 9 接続コード(黒)がしっかり接続されていない場合、液晶は起動画面のまま先へ進みません。
差し込むだけでなく、ねじ部分も締めて接続してください。
- 10 電源は安全のため3時間たつと自動で切れる仕様になっております。
電源が切れた際は、電源スイッチを1度切って、入れなおしてください。
- 11 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 12 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 13 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 本体をハードケースから出し、滑りにくい机などに置いて実習してください。
- 2 産着を着せる場合は、コードをつなぐ前に行ってください。
- 3 青赤コードを機械部及び人形部につないでください。
カチッと音がするまで押し込んでください。
接続部に色が記してありますので、それぞれの色に合わせて差し込んでください。
産着を着たまま人形部に接続する場合は人形左側脇下部にあるスリットより差し込んでください。

- 4 接続コード(黒)を機械部及び人形部につないでください。
写真の様に凹み部を合わせて差し込んでください。
産着を着たまま人形部に接続する場合は人形左側脇下部にあるスリットより差し込んでください。
しっかり接続されていないと機械部液晶画面が起動画面のまま、進まなくなります。
ご注意ください。

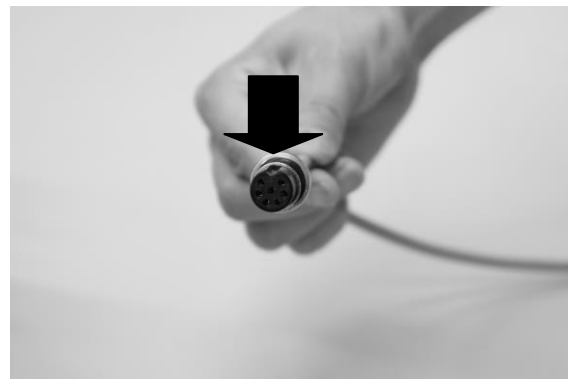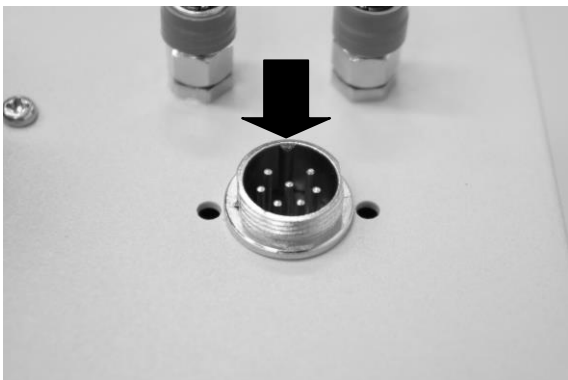

- 5 電源コードを機械部背面に差し込んでください。
- 6 プラグをコンセントに差し込み、機械部背面のスイッチを「ON」にしてください。
- 7 言語を日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字)より選択することができます。
「Language」ボタンを押すと選択画面に移り、「↶」ボタンで元に戻ります。
言語は電源を切っても、そのまま記憶されます。



各手技については以下の説明をご覧ください。

心音

心拍数を「60, 80, 120, 140, 160, 200」の6段階から選び、設定できます。
数値の右側にあるボリュームアップボタンを押すと、音量が倍になります。
付属の聴診器を用いて心臓部付近にて聴診することができます。



呼吸

呼吸数を「20, 40, 50, 60, 80, 100」の6段階から選び、設定できます。
腹部挙上によって確認できます。

脈拍の測定

脈拍数を「60, 80, 120, 140, 160, 200」の6段階から選び、設定できます。
左右浅側頭動脈、左右頸動脈、左右橈骨動脈の6部位と大泉門から計測できます。

体温計測

体温を約 32 度から約 41 度までの 5 段階から設定できます。
付属の体温計を用いて肛門より計測することができます。
その際、無理に奥まで押し込まないようご注意ください。故障の原因となります。
「より高い」から「より低い」まで温度が降下するのに約 10 分かかります。

※1 体温計測を行う際、本体を室温程度に戻した後、実習を行ってください。
(寒冷地等でご使用の場合、正常に温度が上昇しない事がございます。)

※2 付属の体温計以外を使用しないでください。

停留精巣の確認

陰囊の右側には精巣が有り、陰囊の左側には精巣が無いので、停留精巣を確認できます。

保管方法

- 1 人形部にベタつき等がでている場合は、付属のパウダーを軽く塗布してから収納してください。
付属のパウダーをご使用の際は、すべてのコードを人形部へ差し込んだ状態で行ってください。
パウダーがコネクタ内部に入り込み、故障の原因となる恐れがあります。
- 2 機械部背面のスイッチをOFFにしてから、電源コードを抜いてください。
- 3 青赤コードは写真の様にカラー部分を機械部側へ押しこんでから引きぬいてください。
決してコードを引っ張らないでください。



- 4 接続コード(黒)は写真の様にロックをゆるめてから引きぬいてください。
決してコードを引っ張らないでください。



- 5 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------