

# M181-2 I. V. Pad 専用交換用血管 (細)



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

ユーザーマニュアル (151218)

## — I N D E X —

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容／取扱上の注意 2
- 使用手順／保管方法 3

！  
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

## はじめに

---

この度は弊社商品 I.V. Pad 専用交換用血管(細)をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い  
か点検して下さい。

## もくじ

---

はじめに／もくじ	1
目的／内容／取扱上の注意	2
使用手順／保管方法	3

## 目的

### 1 I.V. Pad の血管交換

## 内容

1	交換用血管(細)	20本/袋×5袋
2	血管通し棒	1本
3	保存用アルミ袋	1枚



## 取扱上の注意

- 1 血管の劣化につながりますので、血管の保管時はかならず付属のアルミの袋に入れてください。また、できるだけ高温多湿の場所を避けて保管してください。

## 使用手順



### 血管の交換方法 右図参照

本体からの水漏れを防止するため毎回の  
実習前に交換することをお勧めいたします。

- 1 Uターンチューブを片側外してください。  
(コネクターはUターンチューブに残ります。)
- 2 交換用血管をUターンチューブの  
コネクターに接続してください。
- 3 本体を広げてください。
- 4 反対側から引っ張り、本体内のチューブを  
交換してください。  
コネクター部分が引っかかる場合は、  
無理に引き抜かず、ゆっくり通してください。
- 5 不要な血管を引き抜き、Uターンチューブの  
コネクターを元に戻してください。
- 6 同じように反対側のチューブも交換します。
- 7 血管が蛇行する場合は本体を広げ、  
血管の両端を引っ張りながら本体を戻すと  
まっすぐな走行になります。

## 保管方法

- 1 高温多湿の場所を避けて付属の保存用アルミ袋  
にて保管してください。

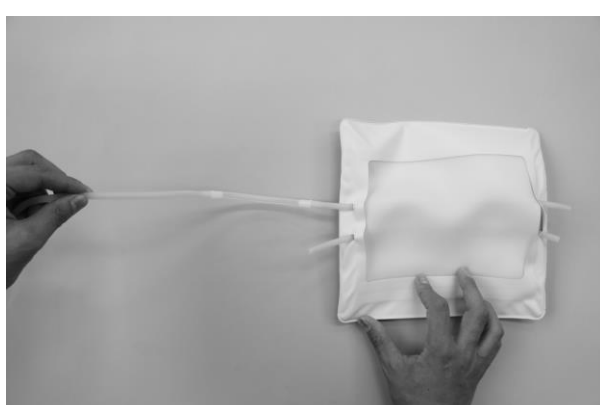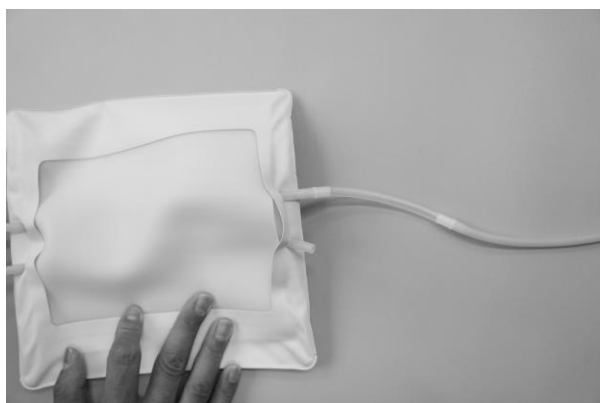

# 株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL <a href="http://sakamoto-model.co.jp">http://sakamoto-model.co.jp</a>
	E-Mail <a href="mailto:info@sakamoto-model.com">info@sakamoto-model.com</a>

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------