

M183

I. V. ジャツジマン



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順	4
●保管方法	5

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M183

はじめに

この度は弊社商品 I.V. ジャッジマン をご購入頂きまして誠に有難う
ございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを
よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品
到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損個所等が無い
か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順	4
保管方法	5

目的

下記の実習(正誤判定)が可能です。

- 1 静脈注射
- 2 採血

内容

- | | | |
|---|----------|----|
| 1 | 表皮部 | 1個 |
| 2 | ポンプ | 1個 |
| 3 | 装着用ベルト | 2本 |
| 4 | 交換用血管 | 1本 |
| 5 | アルカリ単3電池 | 6本 |



取扱上の注意

- 1 使用中、チューブ途中のコネクター（接続部分）が抜けない様ご注意ください。
- 2 本商品で注射の実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。
表皮の劣化につながる恐れがあります。
- 3 水を注入する場合は、緑色ランプの点灯(チャイム音)の場合のみ注入できます。
それ以外の場合に水の注入はしないでください。
- 4 血管の漏れが増し、劣化がひどくなった場合は新しい血管へ交換してください。
- 5 注射針を垂直に突き立てたり、土台を突き破るほどの力でのご使用は、大変危険
ですのでおやめください。
- 6 本商品を患者役に装着して実習する場合、2人一組のペアで実習を行ってください。
- 7 ポンプ上層部、機械部に水がかからないよう注意してください。
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社までご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の
効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 本体を取り出し、滑りにくい机などに置いて実習してください。
- 2 水をご用意ください。
- 3 ポンプの上層部を開け、水を線まで注いでください。(かならず4の作業の前に行ってください。)
- 4 表皮部から出ているチューブとケーブルをポンプにつなぎます。



- 5 ポンプのふたを開け、アルカリ単三電池を6本セットしてください。
- 6 ポンプ側面にあるスイッチをオンにしてください。




- 7 手技を開始してください。
水を注入する場合は、緑色ランプの点灯(チャイム音)の場合のみ注入できます。
それ以外の場合に水の注入はしないでください。
- 8 表皮部裏側にあるマジックテープにベルトを着けて腕に装着して実習できます。
- 9 片づけ方法は[保管方法](#)をご覧ください。

血管の交換方法



交換の前に[保管方法](#)1～5を行った後下記の作業をおこなってください。

- 1 表皮部を開けて図の4ヶ所をはずして、新しい血管を同じようにとり付けてください。

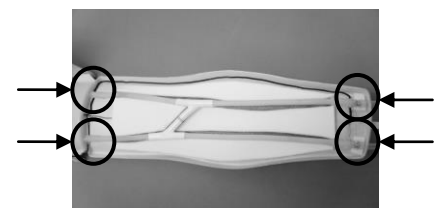

保管方法

- 1 スイッチをオフにしてください。
- 2 白色ロックを閉めてください。
- 3 ポンプに付属しているチューブ 2 本とケーブルを外してください。
- 4 ポンプ内の水を排出してください。
- 5 白色ロックを開けてチューブ内の水を排出してください。
- 6 残りの水は、直射日光を避けながら自然乾燥してください。
- 7 電池を取り出してそれぞれ収納してください。
- 8 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

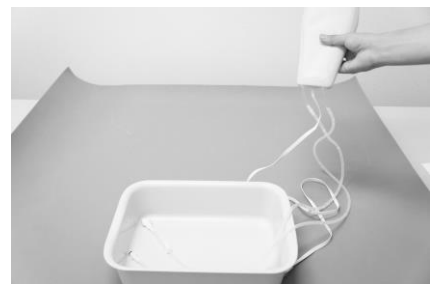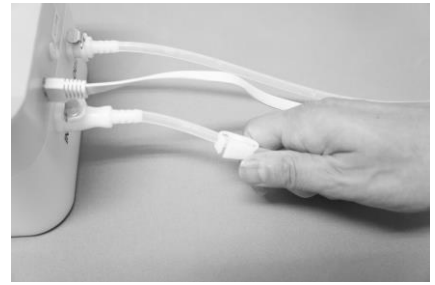

株式会社坂本モデル



本社

〒606-0865
京都市左京区下鴨東高木町34

Tel 075-701-1135

Fax 075-722-5638

URL <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場

〒562-0035
大阪府箕面市船場東1-9-29