

M186-1

サカモト妊産婦モデルⅡ



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (180903)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順／保管方法	4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



はじめに

この度は弊社商品 サカモト妊産婦モデルⅡ をご購入頂き
まして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを
よくお読みいただきご使用くださいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品
到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検してください。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4


目的

下記の学習が可能

- 1 胎児の回旋
- 2 会陰の保護
- 3 胎盤・羊膜の確認
- 4 フリースタイル分娩

内容

- | | |
|---------------------------|----|
| 1 本体(腹部ふた、性器(肌色)1個、ネジ4個付) | 1台 |
| 2 交換用性器(透明) | 1個 |
| 3 ビニール胎児 | 1体 |
| 4 胎盤(臍帯、羊膜付) | 1個 |
| 5 臍帯 | 1個 |
| 6 潤滑剤(ハンドソープ) | 1本 |
| 7 パウダー | 1個 |

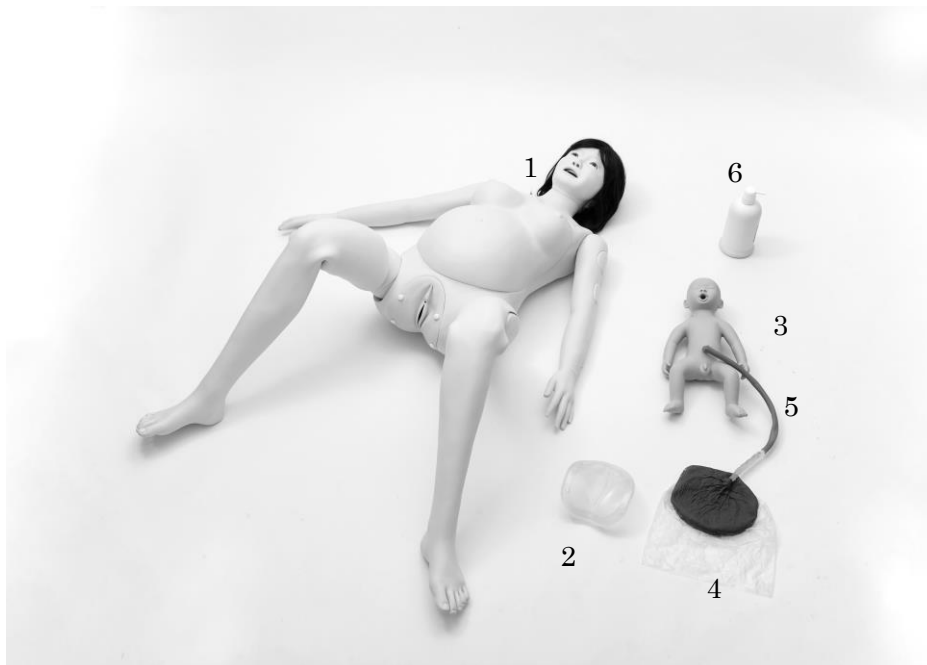

取扱上の注意

- 1 性器部に樹脂製品が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意してください。
- 2 実習の際は、かならず二人一組以上で行ってください。
- 3 性器部の材質上、汚れが付きやすいので取扱いにはご注意ください。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 4 性器部の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いないでください。)
その後、水分をよくふき取りパウダーを塗布してください。
- 5 性器部の枠は洗浄などの際、外すことができます。しかし、保管の時はかならず枠にはめた状態で保管してください。
- 6 無理な荷重をかけたり、落としたりすると破損の原因となります。
- 7 胎児を押し出す際はかならず潤滑剤を塗って滑りをよくしてからおこなってください。
- 8 手技終了後は胎児、性器の潤滑剤を十分に洗い流してください。
- 9 本体に性器部を装着する場合は、性器部ネジ穴が本体ネジ穴とあっているか確認してからネジを差し込んでください。無理に差し込みますと破損の原因になります。
- 10 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 11 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 12 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 本体をハードケースから出し、滑りにくい机などに行いたい体位に置いてください。（この際、腹部ふたは用いません。）
- 2 胎児の腹部, 交換用臍帯, 胎盤のコネクタを接続してください。
- 3 児頭と両肩と母体の性器の裏側に潤滑剤を塗布してください。
- 4 胎児役は本体上半身側に回り、胎児の口に指を入れてください。
- 5 胎児役は胎児を母体内にセットし、胎児を押し出してください。



- 6 実習を開始してください。
- 7 性器部を交換する場合は本体性器部に装着している4つのねじを反時計回りに回してはずしてください。

保管方法

- 1 胎児や性器についての潤滑剤を十分洗い流してから陰干しし、性器部にべたつきが出ている場合はパウダーを塗布してから保管してください。
- 2 性器部は無理な荷重がかからないような状態で保管してください。変形する恐れがあります。
- 3 梱包用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035
	大阪府箕面市船場東1-9-29