

M190-1

M190 用吸引頭部



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容 2
- 使用手順 3
- 取扱上の注意／洗浄および片付けの方法 4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



はじめに

この度は弊社商品 M190 用吸引頭部 をご購入頂きまして

誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを

よくお読みいただきご使用くださいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品

到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い

か点検してください。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
使用手順	3
取扱上の注意／洗浄および片付けの方法	4

目的

下記の実習が可能

- 1 口腔内の吸引(吸引カテーテルは付属していません)
- 2 鼻腔内の吸引(吸引カテーテルは付属していません)
- 3 切開カニューレ内の吸引(切開カニューレは付属していません)
- 4 挿管チューブ内の吸引(挿管チューブは付属していません)

内容

1 本体	1 台	5 模擬痰攪拌用マドラー	1 本
2 専用潤滑剤	1 本	6 シリンジ(カテーテルチップ型)	1 本
3 模擬痰	1 本	7 シリコン栓	2 種
4 模擬痰攪拌用容器	1 個	8 トレー	1 個



使用手順

- 1 ケースより、本体を取り出し平らな台等の上に設置してください。
- 2 食道、気管切開口より出ているチューブにシリコン栓を装着してください。
(右図参照)
- 3 吸引カテーテルを用意してください。サイズは 15Fr まで対応しております。
- 4 気管カニューレ内の吸引を手技される場合は、気管カニューレを用意してください。サイズは ID 7.0 から 8.0 が対応しております。
- 5 挿管チューブ内の吸引を手技される場合は、挿管チューブを用意してください。サイズは ID 7.0 から 8.0 が対応しております。
- 6 気管カニューレと挿管チューブを挿入の際は、必ず専用潤滑剤を塗布してから行ってください。
- 7 模擬痰を作ります。付属の容器に水を 100ml 入れます。模擬痰を 10 振り入れ、付属のマドラーを用い、とろみがつくまでよくかき混ぜてください。次に、もう 5 振り模擬痰を入れ、よくかき混ぜ、しばらく粘度が落ち着くまで様子を見ます。模擬痰(粉)の量を増減することで粘度を調節できます。
- 8 模擬痰を注入し、手技を開始してください。

取扱上の注意

- 1 実習される際、挿入の前に各種カテーテルの水分を拭き取った後、付属の専用潤滑剤を必ず塗布してご使用ください。
なお、潤滑剤は必ず、付属の専用潤滑剤のみご使用ください。
(その他薬剤ご使用の場合、故障の原因となる恐れがあります。)
- 2 油性のマジックやインクは、素材にしみ込んで取れなくなりますので使用しないでください。
- 3 模擬痰は人体には使用できません。
模擬痰を誤って体内に摂取した場合は、すみやかに医師の判断を受けてください。
- 4 本商品は、M190「カト経管栄養トレーナーⅡ」(別売り)の頭部と併用が可能です。経管栄養実習などをご希望の際は、M190「カト経管栄養トレーナーⅡ」(別売り)との併用を推奨させていただきます。
- 5 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

洗浄および片付けの方法

- 1 残っている痰をできるかぎり吸引してください。
- 2 胃のチューブ、気管切開口より出ているチューブに装着しているシリコン栓2種を取りはずしてください。その際、残っている痰が飛び出さないようご注意ください。
- 3 それぞれのチューブ内を洗浄してください。
- 4 それぞれ洗浄したものは十分乾燥させた後、組み立て、保管してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------