

M191

サカモト分娩監視装置シミュレーター



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容 2
- 取扱上の注意 3
- 使用手順／保管方法 4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

はじめに

この度は弊社商品 サカモト分娩監視装置シミュレーター をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用くださいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検してください。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4

目的

下記の学習が可能

分娩監視装置のトレーニング

- ・ トランスジューサー固定練習
- ・ 3段階心拍数設定が可能（正常、頻脈、徐脈）


- ・ 4ヶ所の胎児心音聴取部位設定が可能

（第1骨盤位、第2骨盤位、第1後頭位、第2後頭位）

- ・ 胎児触診
- ・ 腹大動脈、下大静脈の確認

内容

1	ボディ部(腹部ふた付)	1体	5	胎児セット用土台スポンジ	1個
2	模擬分娩監視装置	1台	6	模擬トランスジューサー用ベルト	3個
3	模擬トランスジューサー	3個	7	アルカリ単3電池	4本
4	胎児（触診用）	1体			

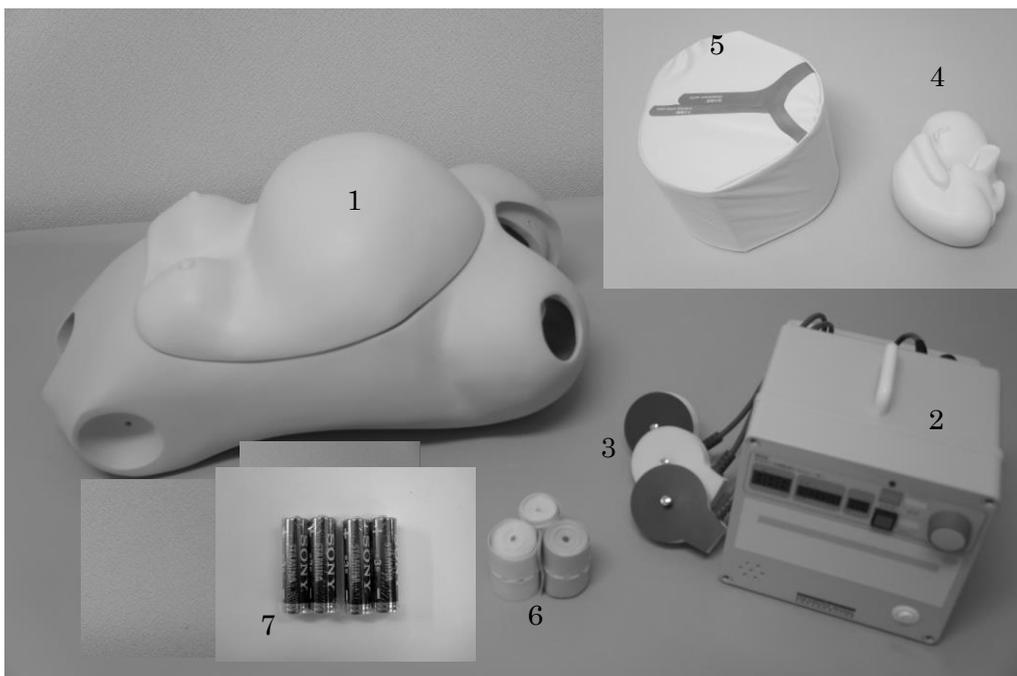

取扱上の注意

- 1 無理な荷重をかけたり、落としたりすると破損の原因となります。
- 2 ケーブル・コードは引っ張ったり、折り曲げたりなど無理に扱わないでください。
- 3 模擬分娩監視装置とカゴは外れない仕様になっておりますので、無理に外そうとしないでください。
- 4 模擬分娩監視装置の表面にあるゼロセットボタンはダミーです。手順を学ぶ際に用いてください。また、液晶の表示、排紙の機能はございません。ご了承ください。
- 5 ボリュームノブは可動域以上回さないでください。破損の原因となります。
- 6 本体に水をかけたり、浸したりしないでください。
- 7 電池は単3型アルカリ乾電池4本をご使用ください。
取り付けは+、-に注意して入れてください。音が小さくなったり、ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 ボディ部腹部ふたをはずし、胎児セット用土台スポンジをセットし、胎児(触診用)を任意の位置にセットしてください。
- 2 腹部ふたをボディに戻してください。
- 3 模擬分娩監視装置の裏側のかご部にある電池ボックスにアルカリ単3電池をセットしてください。
- 4 警告音のスイッチをオフにしてください。
- 5 模擬トランスジューサーのコードを差し込んでください。



マークに2個つき模擬トランスジューサーを、



マークに1個つき模擬トランスジューサーを接続してください。

- 6 模擬分娩監視装置の表面にあるメインスイッチをオンにし、ボリュームを調整してください。
- 7 模擬分娩監視装置の裏側にある警告音の有無スイッチ、心拍数の設定スイッチを選択して手技を開始してください。

保管方法

- 1 ジェルをお使いの場合は、よくふき取ってください。
- 2 保管するときは、電池を必ず取り出して下さい。
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意ください。
- 3 梱包用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------