

M192

装着型浣腸シミュレーター II



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ INDEX －

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容 2
- 取扱上の注意／保管方法 3-4
- 使用手順 5

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



1192

はじめに

この度は弊社商品 装着型浣腸シミュレーター IIをご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意／保管方法	3～4
使用手順	5

目的

下記項目の実習が可能

- 1 浣腸実習
- 2 殿部清拭実習


内容

- | | | | | | |
|---|---------|----|---|-------------|----|
| 1 | 本体 | 1台 | 6 | 模擬軟便(黄褐色) | 1本 |
| 2 | 装着用パンツ | 1枚 | 7 | 模擬軟便攪拌用器 | 1個 |
| 3 | 専用土台 | 1台 | 8 | 模擬軟便攪拌用マドラー | 1個 |
| 4 | ベビーパウダー | 1缶 | 9 | トレー | 1個 |
| 5 | シリコンオイル | 1本 | | | |




取扱上の注意

- 1 本体肛門部周辺は素材の性質上汚れが付きやすいので、ゴム手袋などをして実習してください。
- 2 装着用パンツは防水加工を施してはおりますが完全防水ではございませんので長時間のご使用の際は十分注意して実習してください。
- 3 殿部の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いしないでください)
その後、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布してください。
- 4 殿部の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋の着用をお勧めします。
またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと
取れなくなりますのでご注意ください。
- 5 無理な荷重をかけたり、落としたりすると破損の原因となります。
- 6 装着用パンツと本体は脱着可能です。装着する場合は本体裏とパンツのマジックテープに合わせて装着してください。

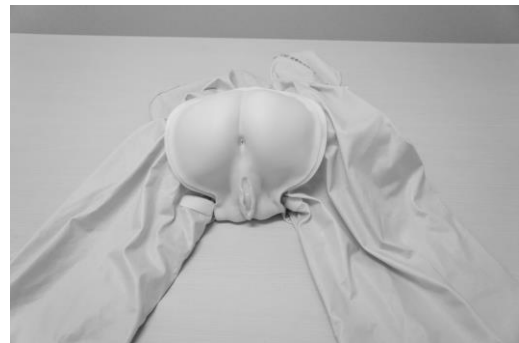

- 7 本体を専用土台に設置する場合は、「ホース取り付け側」に本体裏側黒チューブ側を合わせて設置してください。また、本体を専用土台から取り外す場合は専用土台上部にあるへこみ部分から本体を取りはずしてください。

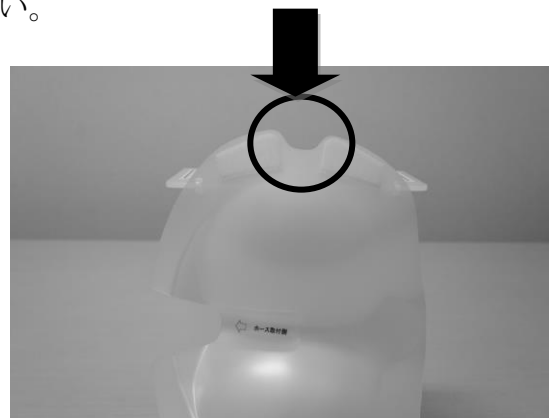

- 8 本体表面軟質部と本体裏側マジックテープ貼り付け部は非分解構造です。破損しますので、無理にはがそうとしないでください。



- 9 模擬軟便は新聞紙などに包み、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。排水口には流さないでください。
- 10 浣腸器のチューブ外径が 12Fr～18Fr (4mm～6mm) のものを使用してください。使用中異常を見つけられた場合は、すぐに使用を中止し弊社または販売店まで御連絡ください。
- 11 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 12 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 収納時に直射日光や、高温・多湿の場所に保管すると、変形・変質することがありますので注意してください。
- 2 模擬軟便は新聞紙などに包み、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。排水口には流さないでください。
- 3 モデルにベタつき等がでている場合は、付属のパウダーを軽く塗布してください。そのままご使用になられると破損の恐れがあります。

使用手順

- 1 専用ケースより本体を取り出してください。
- 2 土台を用いての実習の場合はそのまま実習して下さい。装着型パンツをご使用の際は土台より本体を取りはずし、本体裏と装着用パンツのマジックテープに合わせて装着してください。
- 3 実習前浣腸器にシリコンオイルを十分につけてください。
浣腸器の対応サイズは 12Fr～18Fr（4mm～6mm）です。
このサイズを超えた浣腸器のご使用は模型の破損の原因となります。
- 4 本体肛門部周辺は素材の性質上汚れが付きやすいので、ゴム手袋などをして実習してください。
- 5 チューブの先から液が出ますので、先端を大きめのバケツなどをセットしてください。
- 6 人間が装着して実習を行う場合、まわりの方に十分注意して実習を行ってください。
- 7 クランプを開閉する事で浣腸液の注入抵抗を調節できます。
- 8 **模擬軟便の作り方**
水 50cc を模擬軟便攪拌用器に入れます。模擬軟便の粉末を水に 3～5 振り入れ、模擬軟便攪拌用マドラーで 30 秒間練ります。その後、ご希望の硬さになるまで粉末を少しずつ入れ、練ってください。
その後、殿部へ塗り、清拭実習を行ってください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com
大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29