


AM-5

サカモト坐骨神経刺鍼トレーナー

●重量/約3.2kg


即臥位の患者さんを想定して 実践的にトレーニング

実際の施術を想定した側臥位での刺鍼トレーニングが可能なモデルです。患者さんの姿勢にあわせた体制から、正確に刺入できる技術の習得をめざします。表皮には特殊素材を採用しているため、より実践に近い環境で学ぶことが可能です。モデル内には腸骨稜(腸骨棘)・大転子・坐骨結節が組み込まれており、触知のトレーニングができるとともに2種類の適正ポイントに刺鍼できた際は緑ランプ点灯とチャイム音で判定。初心者一人でも簡単に練習できます。

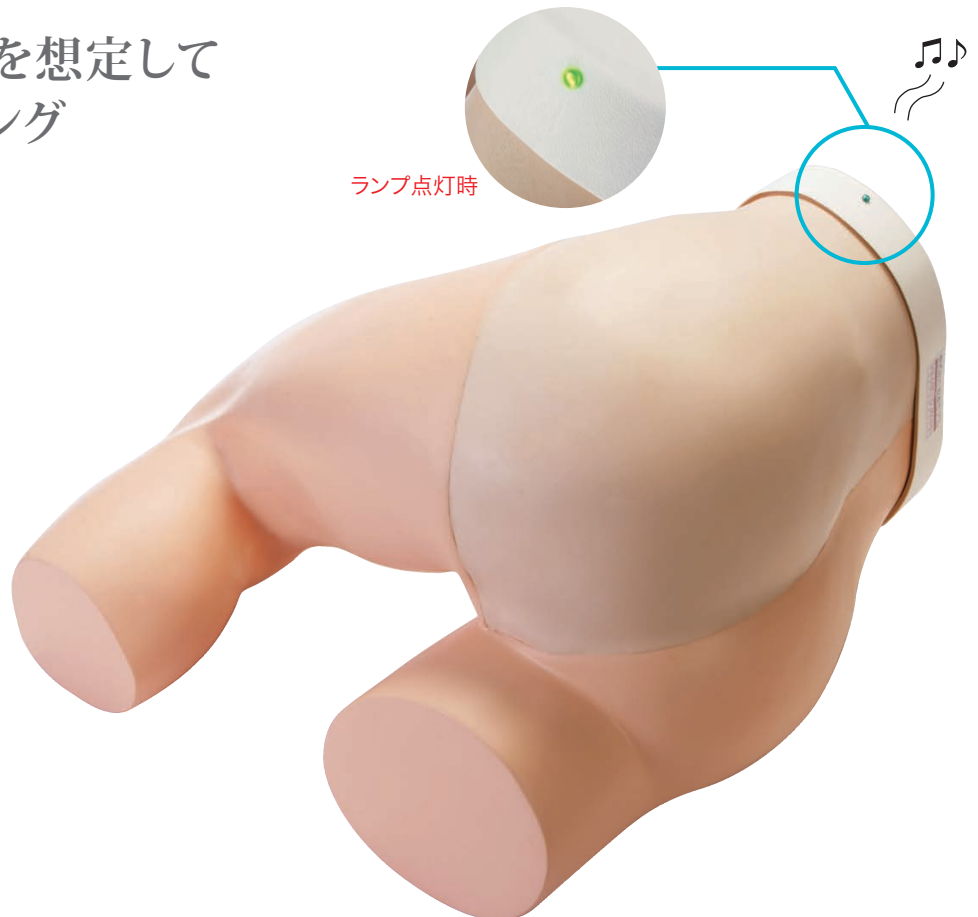

実習

1 【方法1】上後腸骨棘—大転子線

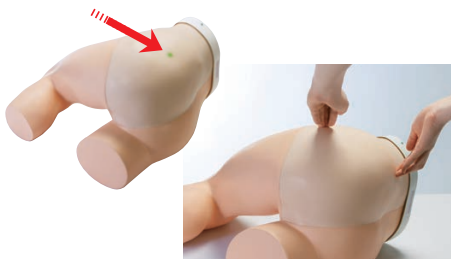

取穴：上後腸骨棘と大転子を結ぶ中点を定め、この中点から直角に3cm下方に刺入点をもとめる。

2 【方法2】坐骨結節—大転子線



取穴：大転子と坐骨結節を結び、坐骨結節側から1/3の点に取穴する。

3 鍼の刺入



側臥位での刺入練習ができます。

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com