

AM-2 刺鍼トレーニングパッド (ランプ、チャイム音判定付)



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— INDEX —

- | | |
|--------------|---|
| ●はじめに／もくじ | 1 |
| ●目的／内容 | 2 |
| ●取扱上の注意／保管方法 | 3 |
| ●使用手順 | 4 |

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→



RM-2

はじめに

この度は弊社商品「刺鍼トレーニングパッド」(ランプ,チャイム音判定付)をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意／保管方法	3
使用手順	4


目的

刺鍼練習－押手、刺手、直刺、斜刺

浅い部位、深い部位

内容

- | | | |
|---|------------------|-----|
| 1 | 本体 | 1 体 |
| 2 | 装着用ベルト | 1 本 |
| 3 | 輪ゴム | 1 本 |
| 4 | 乾電池(単 3 型アルカリ電池) | 2 本 |

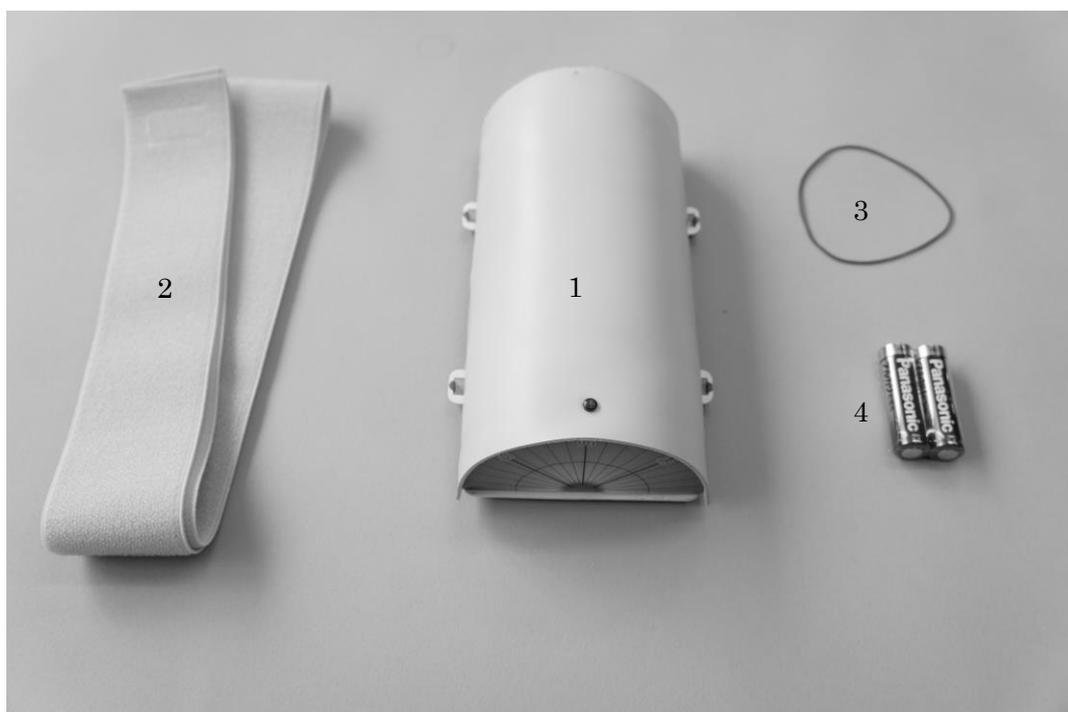

取扱上の注意

- 1 本商品で刺鍼の実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。
表皮やセンサーの劣化につながる恐れがあります。
- 2 落とすと壊れますので、取り扱いには十分注意してください。
- 3 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。
(ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないで下さい。)
- 4 電池は単3型アルカリ乾電池2本をご使用ください。
取り付けは+、-に注意して入れてください。チャイム音が小さくなったり、
ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 5 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店まで
ご連絡下さい。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での
同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

保管方法

- 1 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 2 保管するときは、電池を必ず取り出してください。
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意ください。

使用手順

- 1 方向に注意しながら、電池ボックスに単3型アルカリ乾電池を2本入れてください。
- 2 電源スイッチをONにしてください。
- 3 本製品は深さが2通りあり、側面のシールを見て、浅い部位、深い部位を選択し手技を開始してください。



- 4 正しい部位に注射しますと、緑色ランプが点灯し、チャイム音が鳴ります。
- 5 付属の輪ゴムを本体フック部にひっかけて、刺鍼列を探し出すことができます。



株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------