

AM-3

坐骨神経刺鍼部位 クリア 3D モデル



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— INDEX —

- | | |
|------------|---|
| ●はじめに／もくじ | 1 |
| ●目的／内容 | 2 |
| ●取扱上の注意 | 3 |
| ●使用手順／保管方法 | 4 |

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



BM-3

はじめに

この度は弊社商品 坐骨神経刺鍼部位 クリア 3D モデル をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4

目的

下記の2点の坐骨神経刺鍼部位の確認が可能

- 1 上後腸骨棘—大転子線
- 2 坐骨結節—大転子線

内容

- 1 本体



取扱上の注意

- 1 無理な荷重をかけたり、落とすと破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 2 透明カバーは取り外さないでください。
- 3 透明カバー内部の構造（骨や神経など）は触らないでください。
破損の原因になります。
- 4 針を用いる場合は使用手順をよく読み、それ以外の用途では用いないでください。
- 5 部位説明のシールは、はがさないでください。
- 6 汚れた場合には、柔らかい布に台所洗剤をつけて拭き取ってください。
ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないでください。
- 7 使用上異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 8 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 9 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 本体を取り出し、滑りにくい机などに置いてください。
- 2 透明カバー上の説明シールを用いて確認してください。
- 3 針を用いる場合は、透明カバーの刺入部位に穴が開き、樹脂が貼り付いていますので、そこから刺入してください。また、坐骨神経上に丸状の樹脂が付いていますので、そちらの方に刺入することができます。

保管方法

- 1 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け保管してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------