

AM-5

サカモト坐骨神経刺鍼トレーナー



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順／保管方法	4

！  
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

## はじめに

---

この度は弊社商品 サカモト坐骨神経刺鍼トレーナー をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

## もくじ

---

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意／保管方法	3

## 目的

下記の坐骨神経刺鍼が可能です。

### (方法1) 上後腸骨棘—大転子線

上後腸骨棘と大転子を結ぶ中点を定め、この中点から  
直角に3cm下方に刺入点をもとめる。

### (方法2) 坐骨結筋—大転子線

大転子と坐骨結節を結び、坐骨結節側から1/3の点  
に取穴する。

## 内容

- 1 本体
- 2 アルカリ単3電池 4本



## 取扱上の注意

- 1 本商品で刺鍼の実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。  
表皮やセンサーの劣化につながる恐れがあります。
- 2 落とすと破損の恐れがありますのでご注意下さい。
- 3 汚れた場合には、柔らかい布に台所洗剤をつけて拭き取ってください。  
※ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないでください。
- 4 電池は単3型アルカリ乾電池4本をご使用ください。  
取り付けは+、-に注意して入れてください。チャイム音が小さくなったり、ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 5 使用上異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

## 保管方法

- 1 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 2 保管するときは、電池を必ず取り出してください。  
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意ください。

# 株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL <a href="http://sakamoto-model.co.jp">http://sakamoto-model.co.jp</a>
	E-Mail <a href="mailto:info@sakamoto-model.com">info@sakamoto-model.com</a>

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------