

# M155 上腕部筋肉注射説明模型



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

## － I N D E X －

- |            |   |
|------------|---|
| ●はじめに／もくじ  | 1 |
| ●目的／内容     | 2 |
| ●取扱上の注意    | 3 |
| ●使用手順／保管方法 | 4 |

！  
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→



M155

## はじめに

---

この度は弊社商品 上腕部筋肉注射説明模型をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

## もくじ

---

はじめに／もくじ	1
実習／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順／保管方法	4

## 実習

下記の実習が可能です。

- 1 上肢筋肉注射の正誤判定

## 内容

- 1 本体(廃液バック含む)
- 2 乾電池 (単3型アルカリ乾電池 4本) 1組



## 取扱上の注意

- 1 本商品で実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。  
表皮やセンサーの劣化につながる恐れがあります。
- 2 実習の際には、水（水道水）のみ使用してください。  
水以外の液体は使用しないでください。
- 3 落とすと壊れますので、取り扱いには十分注意してください。
- 4 透明部分には荷重を掛けないでください。破損の原因となります。
- 5 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。  
(ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないで下さい。)
- 6 首部を持って持ち上げるとカバーが脱落する恐れがありますので  
持ち上げるときは両脇を抱えてください。
- 7 電池は単3型アルカリ乾電池4本をご使用ください。  
取り付けは+、-に注意して入れてください。ブザー音が小さくなったり、  
ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店まで  
ご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での  
同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

## 保管方法

- 1 排水後は、立てた状態で保管してください。
- 2 正しい部位に注射された水は、少し時間をおくとほとんど排出されます。注射部位内や排水チューブに残った水滴は、漏れ出しませんが、空気を通す素材となっていますので、やがて自然に乾燥します。
- 3 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 4 保管するときは、電池を必ず取り出してください。  
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意ください。

## 使用手順

- ① 方向に注意しながら、電池ボックスに単3型アルカリ乾電池を4本入れてください。
- ② 電源スイッチをONにしてください。
- ③ 肩峰の触診により注射部位を確認できます。
- ④ 実習してください。
- ⑤ 内蔵ランプとブザーで筋肉注射の正誤を判定します。
  - ・ 深さを含めて正しい位置でできた場合、緑色ランプが点灯します。
  - ・ 注射部位に誤りがある場合は赤色ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
  - ・ 位置は正しいものの深過ぎた場合は、赤・緑両方のランプが点滅し、ブザーが鳴ります。

# 株式会社坂本モデル



本社

〒606-0865  
京都市左京区下鴨東高木町34

Tel 075-701-1135

Fax 075-722-5638

URL <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)

大阪工場

〒562-0035  
大阪府箕面市船場東1-9-29