

M160-2 女性導尿シミュレーターBasic
M160-3 男性導尿シミュレーターBasic
M160-4 導尿シミュレーターBasicセット



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (170710)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順	4－5
●保管方法	6

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらでホームページをご覧くださいませ。→



はじめに

この度は弊社商品 女性・男性導尿シミュレーターBasic をご購入
頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを
よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品
到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検して下さい。

もくじ


はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使い方	4、5
保管方法	6

目的

下記の実習が可能

- 1 一時的導尿法
- 2 持続的導尿法
- 3 カテーテル留置
- 4 陰部洗淨

内容

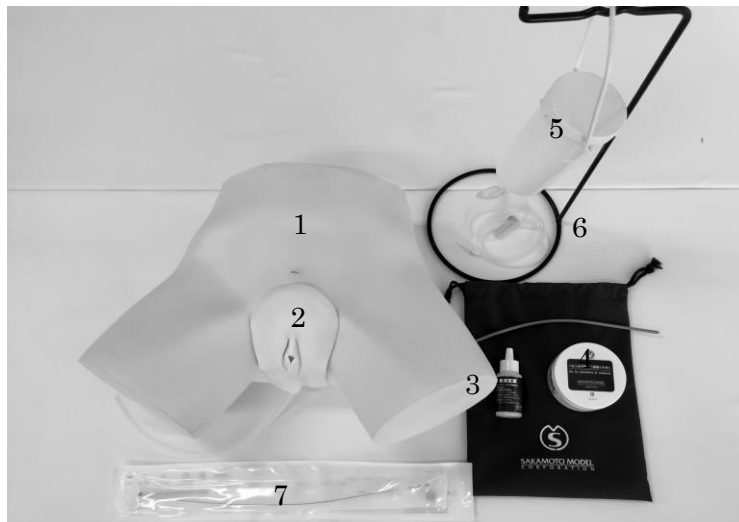

※写真は女性導尿シミュレーターです

1	ボディ	1 個	2	導尿用性器	1 個
3	シリコンオイル	1 本	4	ベビーパウダー	1 個
5	イルリガートルボトル	1 個			
6	イルリガートルボトル用スタンド				1 個
7	導尿用カテーテル				各 1 本

(ネラトンカテーテル 8EG バルーンカテーテル 16Fr)


取扱上の注意

- 1 ボディや性器部に樹脂製品が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意してください。
- 2 ボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 3 軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いしないでください)
洗われる際は水に浸さないでください。内部に浸水しカビ発生の原因となります。
最後に、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布してください。
- 4 性器部を持たれる際は、裏側硬質の受けを持ってください。
- 5 実習の際は、イルリガートルボトルを尿道口より 30cm 程高い位置につるしてください。
(専用のイルリガートルスタンドをご使用ください。)
イルリガートルボトルをあまり高い位置に吊ると、水漏れの原因となります。
- 6 性器部の膀胱は接着されておりますので、膀胱を外さないでください。
性器根元にとりつけられているチューブは、外さないでください。
- 7 カテーテル挿入時はその都度、付属の専用シリコンオイルを必ず塗布してください。
尚、潤滑剤は必ず、付属の専用シリコンオイルのみご使用下さい。
(その他薬剤ご使用の場合、故障の原因となる恐れがあります。)
- 8 バルーンカテーテルの抜去は、必ずバルーンを収縮させてから行ってください。
- 9 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 10 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 11 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使い方

■ 準備


- 1 性器部の裏側の透明膀胱の排水口栓を閉じてください。

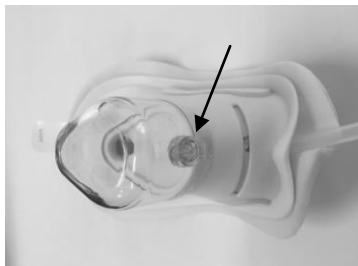

- 2 ボディに装着型性器を、イルリガートルスタンドにボトルをセットしてください。




- 3 性器部のチューブとイルリガートルボトルのチューブを接続してください。

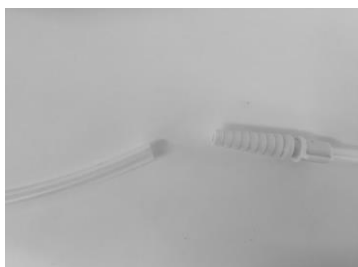


※キャップは外して
ください。

- 4 イルリガートルボトルに 500cc の水を入れ、クランプを開けてください。

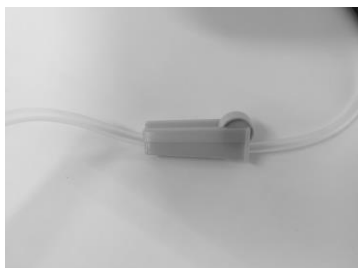

- 5 ネラトンカテーテルの先端に専用の潤滑剤を塗布し、尿道に挿入してください。
状況に応じて、何度か抜去し、再度潤滑剤を塗布してください。
(潤滑剤を塗布せずに挿入すると故障の原因になります。また、挿入角度が間違っていると挿入できませんので、無理に押し込まないようにしてください。)

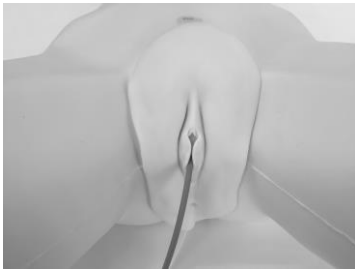

- 6 カテーテルが膀胱内に到達し、先端が目視で確認できる状態（下図参照）で保持すると膀胱内に水がたまりその後排水されます。
排水を受けるトレイ等を準備しておき、カテーテルからの水を受けてください。
(イルリガートル内の水は順次補充してください。)





- 7 カテーテルを抜去し、実習してください。

※陰部洗浄時の注意点

- 1 洗浄後はべたつきますので、付属のパウダーを塗布してください。
- 2 本体に薬剤等は使用しないでください。(故障の原因となる恐れがあります。)

保管方法

- 1 排水を受けるトレーを用意してください。
- 2 ボディから性器部をはずしてください。
- 3 クランプを閉め、イルリガートルボトルとシリコンチューブを取りはずしてください。イルリガートルボトルの水はトレーに排出してください。
- 4 ネラトンカテーテルに潤滑剤を塗布し膀胱内まで挿入してください
膀胱の下にある排水口栓を開いて、膀胱内の水を排水してください。
- 5 カテーテルを抜いてください。
膀胱内の少量の残水が気になる場合は、本体を傾けて綿棒などで吸水してください。
排水口栓は開けたまま次の実習まで保管してください。
- 6 外性器の軽い汚れは、中性洗剤を用いてやわらかい布で軽くふき取り、その後、水を含ませた布でふき取ってください。
- 7 収納ケースに保管される際には、本体を十分に乾かした後、尿道口にシリコンオイルを、性器の他の部分にはパウダーを塗布し保管してください。
この際、尿道口にパウダーが入らないようご注意ください。
- 8 外性器は受け台にセットし、専用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。

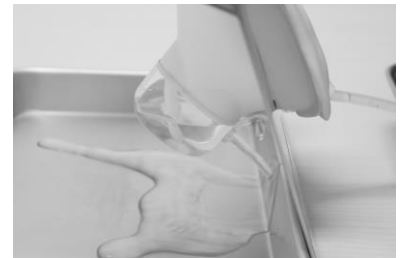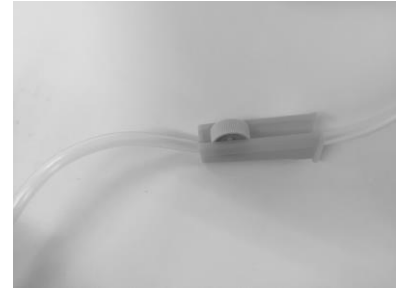

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------