

M165-1, 2

片マヒ体験スーツ M, L サイズ



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容 2
- 取扱上の注意／保管方法 3
- 使用手順 4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



M165

はじめに

この度は弊社商品 片マヒ体験スーツ をご購入頂きまして

誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを

よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品

到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い

か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意／保管方法	3
使用手順	4

目的

片マヒ（左右）の状態を体験する。

内容

1	本体	1体	5	足首装具	1個
2	腕	1本	6	靴	1足
3	手首装具	1個	7	折りたたみ杖	1本
4	ひざ装具	1個			



取扱上の注意

- 1 体験学習は必ず援助者の介助のもとに2人以上が一緒になり行ってください。
- 2 道路上や段差のある場所では歩行の際、転倒に注意してください。
また、物を落としたりする危険もあります、十分注意してください。
- 3 杖は取り出すと、ゴムの作用によって自然に伸びます。取り出しには十分気を付けてください。
- 4 本体および腕は洗濯可能ですが、本体内側胸部あたりにあるタグをご覧になり、指示に従ってください。
- 5 洗濯回数によっては、ファスナー、プリント文字などがもろくなることがあります。
ご了承ください。
- 6 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 7 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 8 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 本体および腕は洗濯可能ですが、本体内側胸部あたりにあるタグをご覧になり、指示に従ってください。
- 2 本体および杖は小さく折りたたみ、それ以外のパーツと共にバッグに収納してください。
- 3 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

使用手順

必ず援助者の介助のもとに2人以上が一緒になり行ってください。

1 本体、腕

- ・商品発送時本体には、左に腕が装着されています。腕を代えたいときは、ファスナーを開き、反対側へ取り付けてください。**使用手順**2番の手首装具着用後、腕のマジックテープ（オス）を本体胸部のマジックテープ（メス）へ付けてください。
- ・腕と本体胸部のマジックテープは強力ですので、端からゆっくりはがしてください。

2 手首装具

- ・装着者の手首外側に合わせ、ベルトで固定してください。

3 ひざ装具

- ・装着者のひざ裏側に合わせ、上下の2本のベルトで固定してください。

4 足首装具、靴

- ・足首装具は左右どちらかの靴の中に入れて靴と固定してください。
- ・靴を履き、ベルトで脚に固定してください。

5 折りたたみ杖

- ・杖は取り出すと、ゴムの作用によって自然に伸びます。取り出しには十分気を付けてください。
- ・杖は長さの調節が可能です。詳しくは添付の取扱説明書をご覧ください。



株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------