

M173 義歯着脱口腔衛生模 型



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

- はじめに／もくじ 1
- 目的／内容／使用手順 2
- 取扱上の注意／保管方法 3

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂
き、不備、破損等ありましたら弊社または販売
店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



はじめに

この度は弊社商品 義歯着脱口腔衛生模型 をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損個所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容／使用手順	2
取扱上の注意／保管方法	3

目的

- ・ 義歯の着脱
- ・ 口腔内の清拭
- ・ 吸引の手順確認

内容

- 1 本体（上下顎用義歯内蔵）
- 2 ケース
- 3 模擬痰
- 4 シリコンオイル



使用手順

—最初に—

ケースより本体を取り出し、平らな台に本体を設置してください。
側位での実習の場合は、シーツ、枕等でお好みのポジションを設定してください。

—義歯着脱の実習—

上顎には総義歯、下顎には部分義歯が標準装備しております。

（別売にて様々な義歯を用意しております。詳細はパンフレットを参照ください。）
各義歯をお好みの手技で着脱の実習を行ってください。

義歯部は外せる構造になっておりますので、着脱方法を訓練できます。

—口腔内ケアの実習—

付属の模擬食塊また、別売歯ブラシ等を用いて口腔内ケアの実習を行ってください。

口内の舌、口蓋垂も再現されており人体に近い柔らかさになっています。



—吸引の手順の確認等—

お手持ちの吸引カテーテル、付属の模擬痰を用いて口腔内、鼻腔内の吸引の実習ができます。模擬痰は使用時水と混ぜ合わせ好みの粘度にし、ご使用ください。

模擬痰を口腔内に使用前に塗布する場合は、シリンジ等に吸引し塗布すると便利です。

取扱上の注意

- 1 材質上、汚れが付きやすいので取扱いにはご注意ください。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 2 落とすと壊れますので、取り扱いには十分注意して下さい。
- 3 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取って下さい。
(ベンジン、シンナー、磨き粉等の溶剤は使用しないで下さい。)
- 4 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡下さい。
- 5 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 6 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取って下さい。
- 2 使用後には、模擬痰の残り等を本体背部のケースを開け滞留物を除去し洗浄等を行った後保管してください。



株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------