

M177 術後ケアスーツ



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ I N D E X －

●はじめに／もくじ	1
●目的	2
●内容	3
●取扱上の注意	4
●保管方法	5
●使用手順	6

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M177

はじめに

この度は弊社商品 術後ケアスーツをご購入頂きまして

誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを

よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品

到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い

か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的	2
内容	3
取扱上の注意	4
保管方法	5
使用手順	6


目的

下記項目の実習が可能

- 1 心電電極
- 2 ストーマケア
- 3 縫合ケア
- 4 気管切開ケア
- 5 ドレーン管理
- 6 持続的導尿ケア

内容

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 1 | 本体 | |
| 2 | 気管カニューレ | 1 個 |
| 3 | 電極 | 6 個 |
| 4 | ストーマ | 1 個 |
| 5 | 縫合シール | 1 枚 |
| 6 | 男性外性器 | 1 個 |
| 7 | 女性外性器 | 1 個 |
| 8 | 電極・ストーマ保管用剥離紙 | 1 枚 |

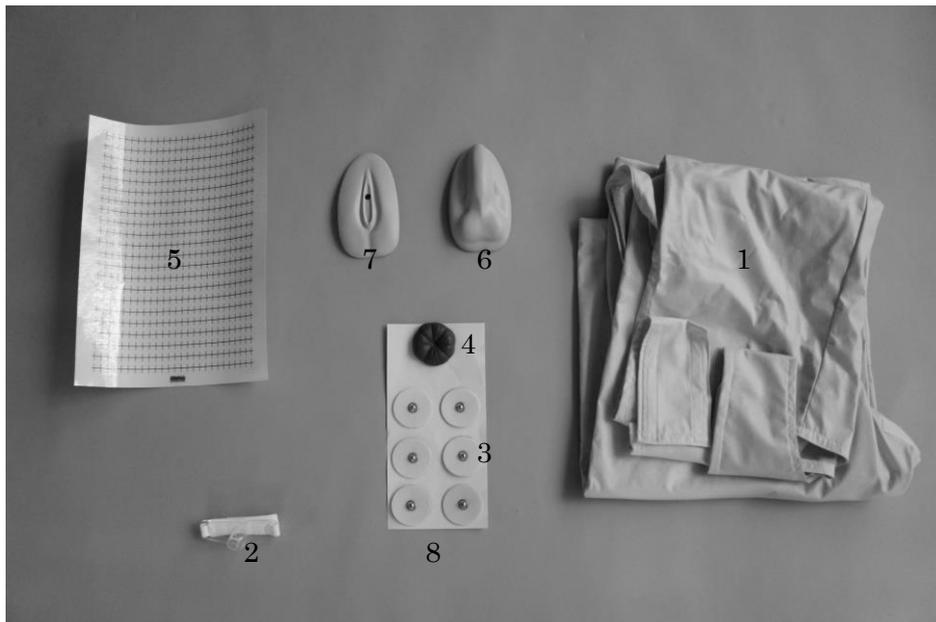

取扱上の注意

- 1 本商品は防水加工を施してはおりますが完全防水ではございませんので長時間のご使用の際は十分注意して実習してください。
- 2 ストーマ、電極の粘着は使用していくと弱まりますが、水洗いしていただくと粘度は回復します。
- 3 油性のマジックやインクは、素材にしみこんで取れなくなりますので使用しないでください。
- 4 本商品は洗濯する事が可能です。
洗濯の方法等はタグを参照してください。
- 5 使用中異常を見つけられた、すぐに弊社または販売店までご連絡下さい。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

保管方法

1 収納時に直射日光や、高温・多湿の場所に保管すると、変形・変質することがありますので注意してください。

2 付属の縫合シール・お持ちの固定シール等ご使用の際は、実習終了後速やかにスーツから外して保管してください。

粘着の具合により生地への破損につながる恐れがあります。

(シール等はがしにくい場合、市販のシール剥がし等を使用することが可能です。)


3 ストーマ、電極はスーツに使用後必ず保管用剥離紙に貼り付け（出荷時の状態にして）保管してください。

使用手順

主要実習項目別の手順を記載しております。
御参考の上、実習を行ってください。

1 心電電極

電極装着時のケアの実習の際は、処置箇所
に電極を貼り付けておこなってくだ
さい。(実習終了後は必ず保管用剥離紙に
貼り付け保管してください。)

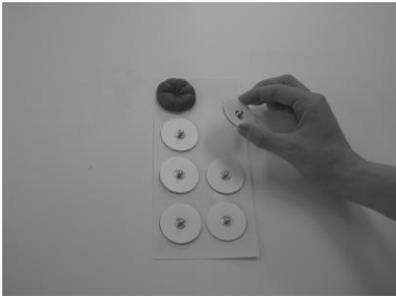


2 ストーマケア

ストーマケアの実習の際は、処置箇所に
ストーマを貼り付けておこなってくだ
さい。
(実習終了後は必ず保管用剥離紙に貼り
付け保管してください。)

3 縫合ケア

縫合痕のケア実習の際は、シールはシー
トからはずし、適正な長さでカットし
処置箇所に縫合シールを貼り付け行っ
てください。
(実習終了後は必ずスーツより縫合シー
ルをすぐに外してください。)

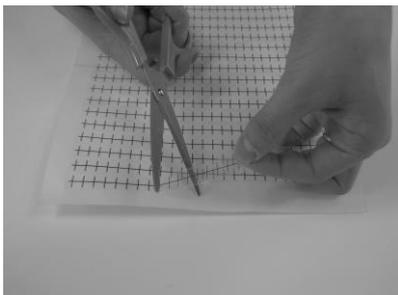

4 気管切開ケア

本スーツでの気管切開部のケア実習は、
付属の気管カニューレをスーツ装着者
の首に巻いて行ってください。

5 ドレーン管理

本スーツには腹腔孔・胸腔孔の2点設け
ておりますのでお持ちの器具をお使いに
なり、実習を行ってください。実習の際
本体に使用したテープ等は終了後必ず剥
がして下さい。

6 持続的導尿ケア

導尿実習を行う際は、本スーツ処置部に
マジックテープで外性器を装着し
実習してください。
本スーツでの導尿実習はカテーテルの留
置時の処置の実習を目的としております
実際に液等を排出する実習はできません。
実習の際処置テープ等の実習をされた際
は必ずはずして保管してください。



株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com
大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29