

M180 装着型女性導尿シミュレーターⅡ

M180-1 装着型男性導尿シミュレーターⅡ



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

|           |     |
|-----------|-----|
| ●はじめに／もくじ | 1   |
| ●目的／内容    | 2   |
| ●取扱上の注意   | 3   |
| ●使用手順     | 4－5 |
| ●保管方法     | 6   |

！  
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→



## はじめに

---

この度は弊社商品 装着型(女性・男性)導尿シミュレーターⅡをご購入  
頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを  
よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品  
到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い  
か点検して下さい。

## もくじ

---

|          |     |
|----------|-----|
| はじめに／もくじ | 1   |
| 目的／内容    | 2   |
| 取扱上の注意   | 3   |
| 使用手順     | 4、5 |
| 保管方法     | 6   |


## 目的

下記の実習が可能

- 1 間歇的導尿法
- 2 持続的導尿法
- 3 カテーテル留置
- 4 陰部洗淨

## 内容

- 1 本体（外性器） 1台
- 2 装着用防水パンツ1枚
- 3 受け台（机上用）1台
- 4 シリコンオイル 1本
- 5 ベビーパウダー 1缶
- 6 イルリガートルボトル 1個
- 7 イルリガートルボトル用スタンド 1個
- 8 導尿用カテーテル 2本1式  
(ネラトンカテーテル8EG バルーンカテーテル16Fr)

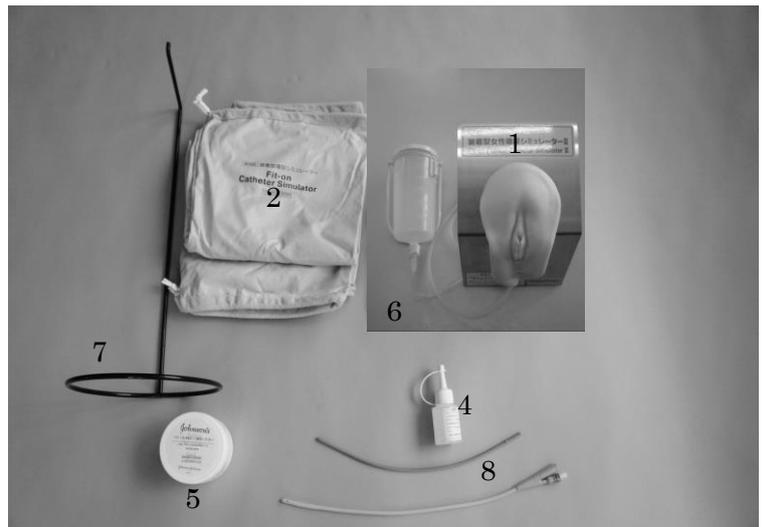

## 取扱上の注意

- 1 性器部に樹脂製品が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意してください。
- 2 性器部の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋の着用をお勧めします。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 3 性器部の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。  
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いないでください)  
その後、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布してください。
- 4 外性器を持たれる際は、裏側硬質の受けを持ってください。
- 5 実習の際は、イルリガートルボトルを尿道口より30cm程高い位置につるしてください。  
(専用のイルリガートルスタンドをご使用ください。)  
イルリガートルボトルをあまり高い位置に吊ると、水漏れの原因となります。  
また、膀胱内に水をためた後、イルリガートルボトル内に水を300CCメモリ以上の水を足さないでください。水漏れの原因となります。
- 6 外性器と膀胱は接着されておりますので、外性器から膀胱を外さないでください。  
また、性器根元にとりつけられているチューブは、外さないようにしてください。  
(故障の原因となります。)
- 7 実習される際、挿入の前にカテーテルの水分を拭き取った後、付属の専用シリコンオイルを必ず塗布してご使用ください。  
尚、潤滑剤は必ず、付属の専用シリコンオイルのみご使用下さい。  
(その他薬剤ご使用の場合、故障の原因となる恐れがあります。)
- 8 装着用パンツは防水加工を施してはおりますが完全防水ではございませんので長時間のご使用の際は十分注意して実習してください。
- 9 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 10 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 11 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

## 使用手順

### 導尿

- 1 本体と受け台を収納ケースから出し、滑りにくい机などに置いて実習してください。
- 2 机上用専用「受け台」を使用する場合、性器部下のスリットをセットし、イルリガートルボトルを性器本体下部から出ているチューブにつないでください。
- 3 膀胱の排水口栓を閉じてください。
- 4 装着用パンツを使用する場合、パンツのマジックテープに上部から順につけ、パンツを患者役やモデル人形に着用させてください。その後、イルリガートルボトルを性器本体上部から出ているチューブにつないでください。
- 5 イルリガートルボトルをイルリガートルスタンドに設置してください。
- 6 クレンメがしまっている事を確認し、イルリガートルボトルに300CCの水を入れてください。
- 7 クレンメを開いてください。
- 8 ネラトンカテーテルの先端に専用の潤滑剤を塗布し、尿道に挿入してください。状況に応じて、何度か抜去し、再度潤滑剤を塗布してください。  
(潤滑剤を塗布せずに挿入すると故障の原因になります。また、挿入角度が間違っていると挿入できませんので、無理に押し込まないようにしてください。)
- 9 カテーテルが膀胱内に到達し、少し顔を出した状態  
(右図参照)で保持すると膀胱内に水がたまりその後排水されますので、排水を受けるトレー等を準備しておき、カテーテルからの水を受けてください。  
(イルリガートル内の水は順次補充してください。)  
膀胱内に水をためた後、イルリガートルボトル内に水を300CCメモリ以上の水を足さないでください。水漏れの原因となります。



## 陰部洗淨

- 1 付属の装着用防水パンツに本体（外性器）を装着し水を用いて実習してください。水を使用した場合、べたついたり、すべりが悪くなる事がございますが、品質上問題はございません。しかし、裂けやすい状態になりますので、取扱いには十分注意してください。
- 2 本体に薬剤等は使用しないでください。（故障の原因となる恐れがあります。）

## 保管方法

- 1 実習を終了してください。（挿入しているカテーテルはそのままにしてください。）
- 2 排水を受けるトレイを用意してください。
- 3 クレンメを閉め、イルリガートルボトルとシリコンチューブを取りはずしてください。イルリガートルボトルの水はトレイに排出してください。
- 4 膀胱の下にある排水口栓を開いて、膀胱内の水を排水してください。
- 5 カテーテルを抜いてください。  
膀胱内の残水が気になる場合は、本体を傾けてさらに排水してください。排水口栓は開けたまま次の実習まで保管してください。
- 6 外性器の汚れは、中性洗剤を用いてやわらかい布で軽くふき取り、その後、水を含ませた布でふき取ってください。
- 7 収納ケースに保管される際には、本体を十分に乾かした後、尿道口にシリコンオイルを、性器の他の部分にはパウダーを塗布し保管してください。  
この際、尿道口にパウダーが入らないようご注意ください。
- 8 外性器は受け台にセットし、専用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。



# 株式会社坂本モデル



|    |   |
|----|---|
| 本社 | 〒606-0865<br>京都市左京区下鴨東高木町34   |
|    | Tel 075-701-1135  |
|    | Fax 075-722-5638  |
|    | URL <a href="http://sakamoto-model.co.jp">http://sakamoto-model.co.jp</a>   |
|    | E-Mail <a href="mailto:info@sakamoto-model.com">info@sakamoto-model.com</a> |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 大阪工場 | 〒562-0035       |
|      | 大阪府箕面市船場東1-9-29 |