

M211 透明男性尿道説明モデル

【取り扱い説明書】

透明男性尿道説明モデル をお買い上げいただきありがとうございます。この取り扱い説明書には、製品を安全にお使いいただくための注意事項と取り扱い方を記載しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。ご購入後、すみやかに内容物をご確認いただき、万一不足や破損がありましたら弊社までご連絡ください。

【取扱上の注意】

- 1 本体の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋(粉が付着する恐れがありますのでパウダーフリー手袋)の着用をお勧めします。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 2 カテーテルを挿入する際には付属のシリコンオイルをご使用ください。
- 3 パウダーなどの粉が本体に付着しますと透明感が損なわれますのでご注意ください。
- 4 水洗いは可能ですが、布でふき取らず、自然乾燥を行なってください。
(シンナー等の溶剤を用いないでください)
- 5 製品を使用中に異常がある場合、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 6 本製品は高度な訓練を実現するシミュレーターですが、実際の処置において同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【お手入れ・保管】

- 1 直射日光が当たらないようにしてください。高温になる場所、湿気・ほこりの多い場所では保管しないでください。また製品を何かと接触した状態で保管すると、変形・変質することがありますのでご注意ください。付属のケースに保管することをお勧めします。
- 2 尿道に挿入したカテーテルを放置するとカテーテルが膨張することがあります。実習の終わりに必ずカテーテルを抜去してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
Tel	075-701-1135
Fax	075-722-5638
URL	http://sakamoto-model.co.jp
E-Mail	info@sakamoto-model.com

2023.11.24.