

M107

サカモトインファント

ウォーマーシミュレーター



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (241213)

— INDEX —

●はじめに／もくじ	1
●目的	2
●内容	3
●取扱上の注意	4
●使用手順	5-9
●保管方法	10

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂
き、不備、破損等ありましたら弊社または販
売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げま

株式会社坂本モデル



はじめに

この度は弊社商品 サカモトインファントウォーマーシミュレーター
をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルを
よくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品
到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか
点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的	2
内容	3
取扱上の注意	4
使用手順	5—9
保管方法	10

目的

下記項目の実習が可能

- ・加温ヒーターの設定シミュレーション ※1
- ・アラーム・タイマーの設定
- ・照明の操作
- ・体温表示シミュレーション ※2
- ・パルスオキシセンサーの接続
- ・脈拍表示シミュレーション ※2
- ・呼吸補助装置の操作 ※3
- ・3誘導心電図の装着
- ・吸引手技

※1 実際の加温機能はありません。

※2 表示される数値は実際のものではありません。

※3 送気されるのは空気です。

内容

- 1 本体 1台
- 2 電源コード 1本



取扱上の注意


- 1 新生児人形(別売り)はシリコン製ですので、直射日光や、高温・多湿の場所に保管すると、変形・変質することがありますので注意してください。
- 2 新生児人形(別売り)はシリコン製につき、汚れ、しみ等がつきやすいので、新聞、印刷物などの上に置かないでください。
皮膚の汚れは、中性洗剤で、軽く拭き取る程度で処置してください。
その際、新生児人形のコード接続部に接触しないようご注意ください。
- 3 油性のマジックやインクは、皮膚にしみこんで取れなくなりますので使用しないでください。
- 4 無理な荷重をかけたり、落としたりすると破損の原因となります。
- 5 新生児人形、機械部は水をかけたり、浸したり（沐浴）しないでください。
- 6 操作パネルの表面を強く押したり、爪やボールペンなどの先のとがったもので操作しないでください。故障の原因となります。
- 7 電源コードは機械部背面のスイッチをオフにしてから、抜いてください。故障の原因となります。
- 8 コードを無理に引き抜こうとしないでください。故障の原因となります。
- 9 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 10 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 11 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使用手順

- 1 電源コードを機械部背面に差し込んでください。



- 2 プラグをコンセントに差し込み、機械部背面のスイッチを「ON」にしてください。

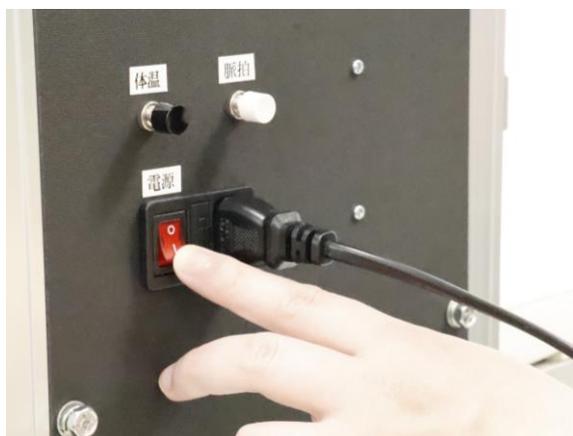


照明

照明スイッチを押すと照明が点灯します。
もう一度押すと照明が消えます。



体温

背面の「体温」ボタンを押すたびに新生児の体温を「36.0」「35.0」に切り替えて表示することができます。

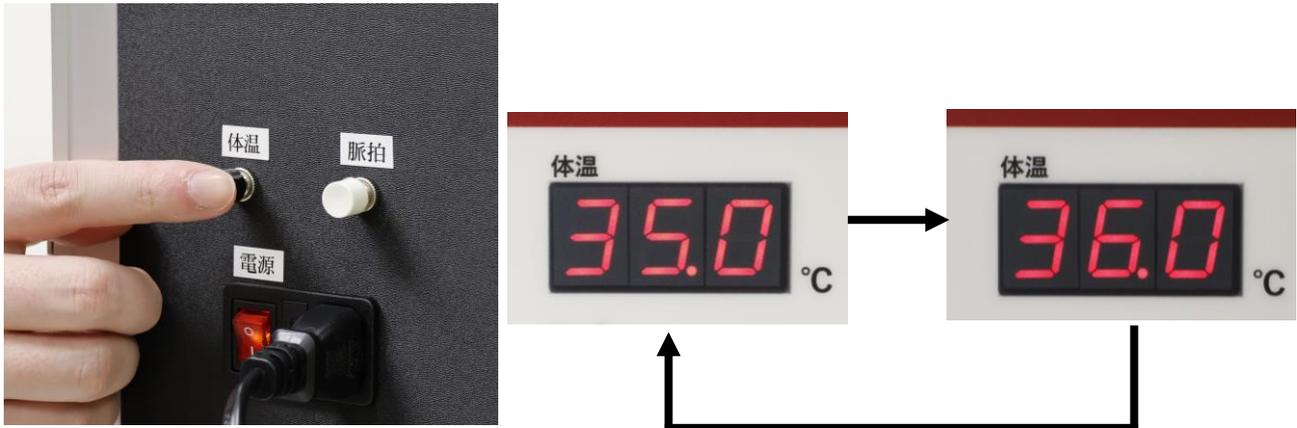

- 体温プローブ(別売り)の取り付け
操作パネル前面に体温プローブのコネクターを接続してください。



新生児人形に感熱部を専用テープで固定してください。



加温ヒーターの設定

起動時は「36.0℃」と表示されます。

・設定出力の変更

「設定出力」を長押しすると表示が「50%」と表示に切り替わり点滅します。



「↑」「↓」を押して0%~100%の範囲で設定してください。(5%刻みで設定ができます。)



5秒間操作せずに放置すれば表示が点灯に変わり設定完了です。

・設定温度の変更

「設定体温」を長押しすると表示が「36.0」が点滅します。



「↑」「↓」を押して34℃~38℃の範囲で設定してください。(0.5℃刻みで設定ができます。)



5秒間操作せずに放置すれば表示が点灯に変わり設定完了です。

タイマーの設定

「スタート ストップ」を押すと計測が始まります。



1分、3分、5分、10分が経過する度にチャイム音が鳴ります。

再度「スタート ストップ」を押すと、計測が一旦停止されます。

再度「スタート ストップ」を押すと、続きから再開されます。

計測中に「リセット」ボタンを押すと、0秒に戻り再び計測が始まります。



脈拍数の設定

起動時

脈拍数…「140」と表示されます。

背面のスイッチを押すたびに表示が「58」「98」「140」に切り替わります。



SpO₂の接続

- ・パルスオキシメーター(別売り)の取り付け

操作パネル前面にパルスオキシメーターのコネクターを接続してください



新生児人形にセンサー部を固定してください。



SpO₂表示は常時「98」と表示されます。

※パルスオキシメーター部の4箇所スイッチは操作できません。

保管方法

- 1 新生児人形(別売り)にベタつき等がでている場合は、付属のパウダーを軽く塗布してから収納してください。
- 2 機械部背面のスイッチをOFFにしてから、電源コードを抜いてください。
- 3 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

- 製品内容の一部は他メーカーのものを使用しており、製品名称などが商標登録（TM、®）されている場合があります。
- Some of the components used in this product are manufactured by other companies, and product names, etc. for these components may be trademarks or registered trademarks of the manufacturers.

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町 34

Tel 075-701-1135

Fax 075-722-5638

URL <https://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail info@sakamoto-model.com

製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更
することがあります。

SAKAMOTO MODEL CORPORATION

34,Higashitakagicho,Shimogamo
Sakyo-ku,KYOTO606-0865, JAPAN

Tel +81-75-701-1135

Fax +81-75-722-5638

URL <https://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail trade@sakamoto-model.com

Product specifications and appearance are subject to
change for improvement without notice.