

AM-4 坐骨神経刺鍼説明模型



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意／保管方法	3
●使用手順	4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



PH-4

はじめに

この度は弊社商品 坐骨神経刺鍼説明模型をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意／保管方法	3
使用手順	4

目的

下記の坐骨神経刺鍼が可能です。

(方法1) 上後腸骨棘—大転子線


上後腸骨棘と大転子を結ぶ中点を定め、この中点から直角に3 cm下方に刺入点をもとめる。

(方法2) 坐骨結筋—大転子線

大転子と坐骨結節を結び、坐骨結節側から1/3の点に取穴する。

内容

- 1 本体
- 2 乾電池（単3アルカリ電池 4本） 1組
- 3 側臥位用台座 1組

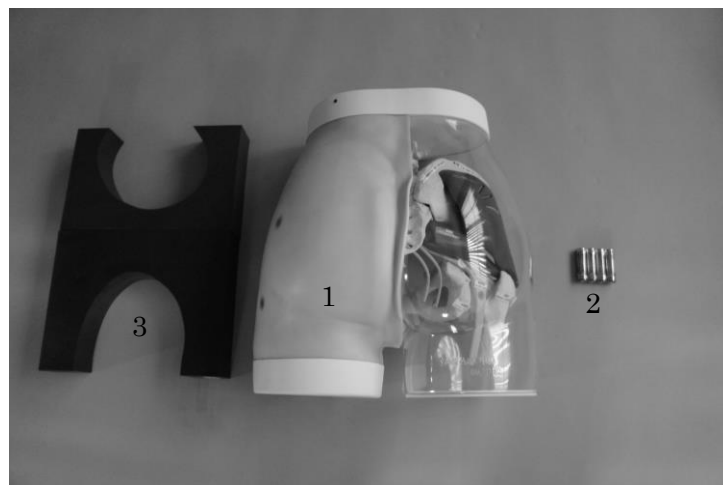

取扱上の注意


- 1 本商品で刺鍼の実習をされる際には針先の新しいものをご使用下さい。
表皮やセンサーの劣化につながる恐れがあります。
- 2 落とすと壊れますので、取り扱いには十分注意してください。
- 3 汚れた場合には、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。
(ベンジン、シンナー、磨き粉等は使用しないで下さい。)
- 4 電池は単3型アルカリ乾電池4本をご使用ください。
取り付けは+、-に注意して入れてください。チャイム音が小さくなったり、
ランプの点灯が暗くなると、電池を新しいものと交換してください。
- 5 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店まで
ご連絡下さい。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での
同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

保管方法

- 1 直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 2 保管するときは、電池を必ず取り出してください。
電池を入れたまま保管すると、電池が腐食し通電不良の原因となりますのでご注意
ください。

使用手順

- 1 方向に注意しながら、電池ボックスに単3型アルカリ乾電池を4本入れてください。
- 2 電源スイッチをONにしてください。
- 3 付属の側臥位用台座にセットしてください。
(右図参照)

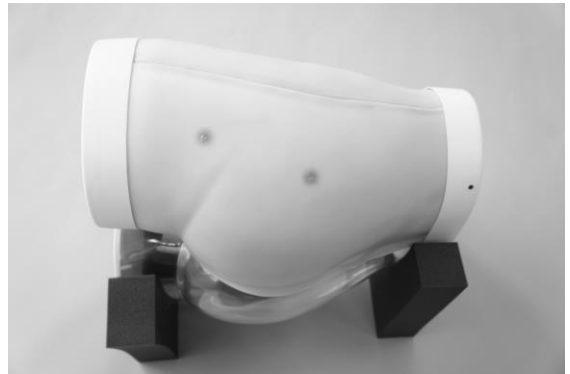

- 4 手技を開始してください。
- 5 正しい部位に注射しますと、緑色ランプが点灯し、チャイム音が鳴ります。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035
	大阪府箕面市船場東1-9-29