

M107-3 サカモトベビー(男)

M107-4 サカモトベビー(女)



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

— I N D E X —

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●保管方法	4

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧いただけます。→



M107-3,4

はじめに

この度は弊社商品 サカモトベビー（男、女）をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
保管方法	4

目的


下記項目の実習が可能

- ・ 沐浴
- ・ 授乳
- ・ 衣類の着脱、おむつ交換

など

内容

1	本体	1 体	5	模擬軟便攪拌用マドラー	1 個
2	臍帯	1 個	6	模擬軟便攪拌容器	1 個
3	ベビーパウダー	1 個	7	模擬軟便（黄色）	1 個
4	産着	1 着	8	トレー	1 個

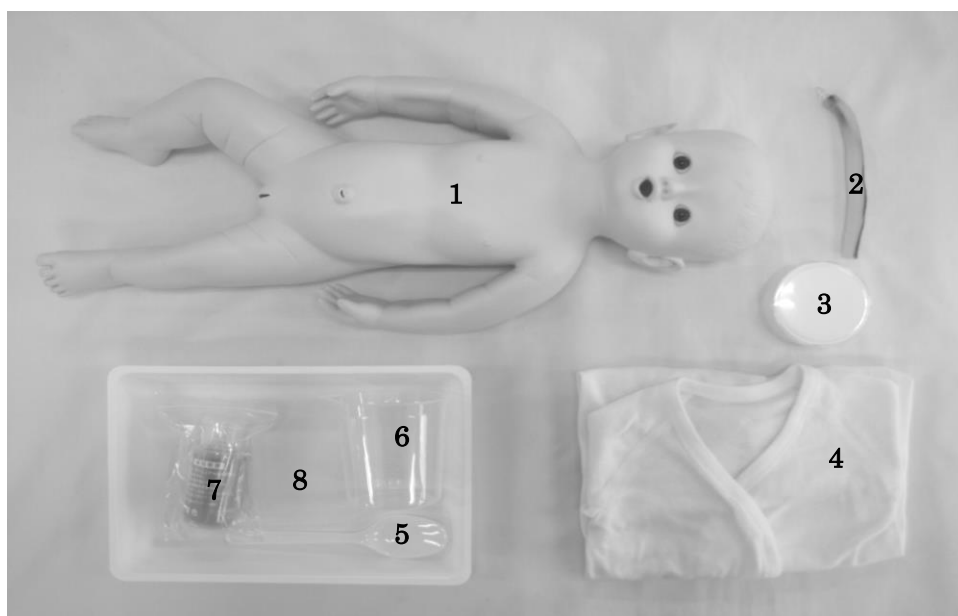

取扱上の注意

- 1 モデルはシリコン製につき、汚れ、しみ等がつきやすいので、新聞、印刷物の上に置かないでください。皮膚の汚れは、中性洗剤、アルコール系薬剤で、軽く拭き取る程度で処置してください。
- 2 油性のマジックやインクは、皮膚にしみこんで取れなくなりますのでモデルに使用しないでください。
- 3 模擬軟便は新聞紙などに包み、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。配管に詰まる恐れがありますので、排水口には流さないでください。
- 4 模擬軟便使用後は、臀部を綺麗に拭いて下さい。そのままにしますと、色移りする可能性があります。
- 5 運搬は慎重になさってください。キズがついたり破れたりしますと、防水効果が損なわれます。
- 6 モデルは無理にねじったり、可動域以上に動かさないで優しく扱ってください。無理な動きをさせると破損の原因となります。
- 7 モデルにベタつき等がでている場合は、付属のパウダーを軽く塗布してください。そのままご使用になられると破損の恐れがあります。
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 入浴実習の後では、よく水分を拭き取り、ベビーパウダーを軽くかけてください。
- 2 模擬軟便使用後は、臀部を綺麗に拭いて下さい。
そのままにしますと、色移りする可能性があります。
- 3 模擬軟便は新聞紙などに包み、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。
配管に詰まる恐れがありますので、排水口には流さないでください。
- 4 汚れた時は、柔らかい布に中性洗剤を染み込ませ拭き取ってください。
その後、水拭きしてください。その後、水分を乾いた布でふきとり
ベビーパウダーを塗布してください。
- 5 衣服を装着させる場合、着せた状態で保管しますと、シリコン剤がにじみ出て
衣服にシミが付くことがありますのでご了承ください。
- 6 保管される際には、各関節を伸ばした状態で横にし、保管してください。
複数台保管される際には、重ねずに1体ずつ保管してください。
- 7 直射日光の当たる所や、高温多湿の所での保管は避けてください。

使用手順

模擬軟便の作り方

水 50cc を模擬軟便攪拌用器に入れます。模擬軟便の粉末を水に 3～5 振り入れ、
模擬軟便攪拌用マドラーで 30 秒間練ります。
その後、ご希望の硬さになるまで粉末を少しずつ入れ、練ってください。
その後、殿部へ塗り、清拭実習を行ってください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com
大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29