

M206 問診さん

簡易マニュアル

株式会社 坂本モデル

目次

1. 各部詳細	3
2. 利用方法	4~6
3. 注意事項	7
4. お問い合わせ先	8

1. 各部詳細

1-1. 問診さん各部構造

各部の詳細は下図の通りです。



客観カメラ



Wi-Fi
アクセスポイント(内蔵)




⑤オペレーション
インストラクターシステム

モニターカメラ
(内蔵)
音声出力
システム
(内蔵)



電源ケーブル2本(コンセントへ)

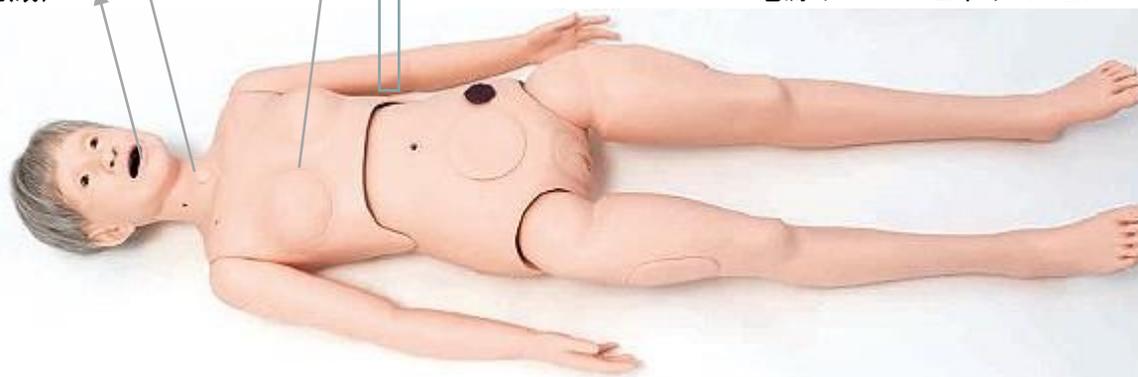

1-2. 付属品について

付属品は以下のリストの通りです。

客観カメラ×1、オペレーションインストラクターシステム (タブレット+ヘッドセット)

I.V.Pad×1ヶ、ベビーパウダー×1、各USB給電用2口コンセント×1、電源ケーブル×2

L字変換パーツ×2、検査衣×1、シナリオデータCD×1

2. 利用方法

2-1. 問診システム初期接続方法

- 1 問診さん本体ケーブル接続部に各種2本のケーブルをセットし、コンセントへ接続し客観カメラもコンセントへ接続してください。

- 2 タブレットの電源をONにして頂き、wi-fiが内蔵アクセスポイントに接続されている事を確認してください。

(図1参照)



- 3 タブレットマイク入力部にヘッドセット出力端子を差し込み、タブレット内アプリ「問診」と記入しているアプリをタップし起動させてください。

(図2参照)



- 4 起動後、各カメラスタンバイ出来ましたら(数秒~数分かかる事がございます。)問診さんセットアップは完了です。

(図3参照)



2. 利用方法

2-2. 音声機能利用方法

1. P 4 の 1～4 を参照頂き、各ケーブル接続、電源ON/OFFを確認してください。

2. 次に、アプリ内音声通話をタップし(図 1)、
マイクに向け発声し、問診さんより発声されているかを確認ください



図1

3. また、問診さんに向け、音声を発声し、タブレットのヘッドセットより
音声が出力されているか確認ください。

(終了時は再度、(図 2) キャンセル部をタップしてください。)

こちらが対話システムの基本利用となります。

(音量調整はヘッドセット、タブレットの+-により可変します)



図2

4. 次に、タブレット内の問診アプリをタップし、接続カメラの映像が正しく映っているかを確認してください。(アプリ内でカメラ分割モード、全画面モードを切り替えご使用ください)

全画面モード



カメラ分割モード



5. これで接続は完了です。実習にご活用ください。

(上記方法をお試し頂き接続がうまくいかない場合、弊社までご連絡ください。)

2. 利用方法

2-3. 画像システム 初期利用方法

1. 問診さん画像システムの録画方法

問診さんの電源を入れて頂いた時より自動的に撮影が開始されます。

2. 録画した画像をタブレット内で再生

(図1)を参照ください。

図1手順完了後、再生したい画像を選び、タップすると画面が再生できます。
図2手順で再生したい画像を選択できます。

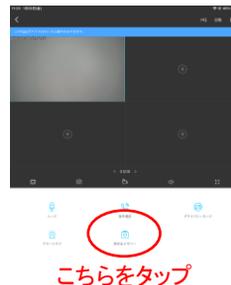


図1



図2

※画像検索時、スライダーを上下にピンチアウトし、拡大後任意画像を検索頂くと便利です

- #### 3. 画像データは主観カメラ、客観カメラに挿入しているマイクロSDカードへ録画されます。マイクロSDカードをカメラより外して頂き、PC等で再生する事が出来ます。(環境によって、別途カードリーダーが必要な場合がございます。)



3. 注意事項

- 問診さん本体内部は精密機器を含みますので、水を用いた使用には充分気を付けて頂き、特に口腔部、頸部カメラ部、電源ケーブル接続部には**水が流入しないよう**ご使用ください。
- 問診さん本体を**改造、加工**しないでください。
(性能に支障をきたし、修理不可となる可能性があります。)
- モデル人形を移乗、体位変換の際は、ケーブル類を外してください。
- 電源に接続をする際、外したりされる際はケーブル類の断線に十分お気をつけておこなってください。
- 洗髪、口腔内手技は行わない様にしてください。
- 問診さんボディはシリコン製です。シリコンに含まれる油分が表面に出て、べたつく事がございます。付属のベビーパウダーを塗布下さい出荷時の表皮の感触に戻ります。
- 問診さんボディは非常に柔らかい材質です。高い耐久性も兼ね備えておりますが、鋭利なものでの傷等にお気をつけください。
(少しの傷でも発見時には、弊社まですぐご一報くださいませ。)
- 各機器を本システム以外の用途で使われる際、また、使われた際のご質問、及び、ご要望にはお応え出来かねる事がございます。
また、本システムは予告なく、パーツ、部材等変更になる可能性がありますあらかじめご了承くださいませ。

4. お問い合わせ先

お問い合わせは以下をご利用ください。

〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34

株式会社 坂本モデル

T075-701-1135

F075-722-5638

Mail:info@sakamoto-model.com

このたびは、弊社製品“問診”さんをご採用頂き誠に有り難うございます。

付属させて頂いているCDには、問診訓練の簡易例のデータを添付しております。

その他、任意にご活用頂けます様、セリフ項目を空白にしているデータも添付しております。
お手元にて、シナリオ作成にお役に立てば幸いです。

また、本製品ご使用頂いたご感想、ご要望等頂けましたらモノづくりの品質向上につなげていく所存でございます。
是非とも、上記までご連絡くださいませ。

今後共、弊社並びに弊社製品を何卒、宜しくお願い申し上げます。

坂本モデル