

M160 透明女性導尿模型

M160-1 透明男性導尿模型



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ INDEX －

●はじめに／もくじ	1
●目的／内容	2
●取扱上の注意	3
●使用手順	4
●保管方法	5

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

はじめに

この度は弊社商品 透明(女性・男性)導尿模型をご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無い
か点検して下さい。

もくじ

はじめに／もくじ	1
目的／内容	2
取扱上の注意	3
使用手順	4
保管方法	5


目的

下記の実習が可能

- 1 間歇的導尿法
- 2 持続的導尿法
- 3 陰部洗淨
- 4 留置バルーンの確認

内容

- | | | |
|---|-------------|------|
| 1 | 本体（外性器） | 1台 |
| 2 | イルリガートルボトル | 1個 |
| 3 | イルリガートルスタンド | 1個 |
| 4 | 専用潤滑剤 | 1本 |
| 5 | ベビーパウダー | 1缶 |
| 6 | 導尿用カテーテル | 2本1式 |
- （ネラトンカテーテル 8EG バルーンカテーテル 1 6Fr）

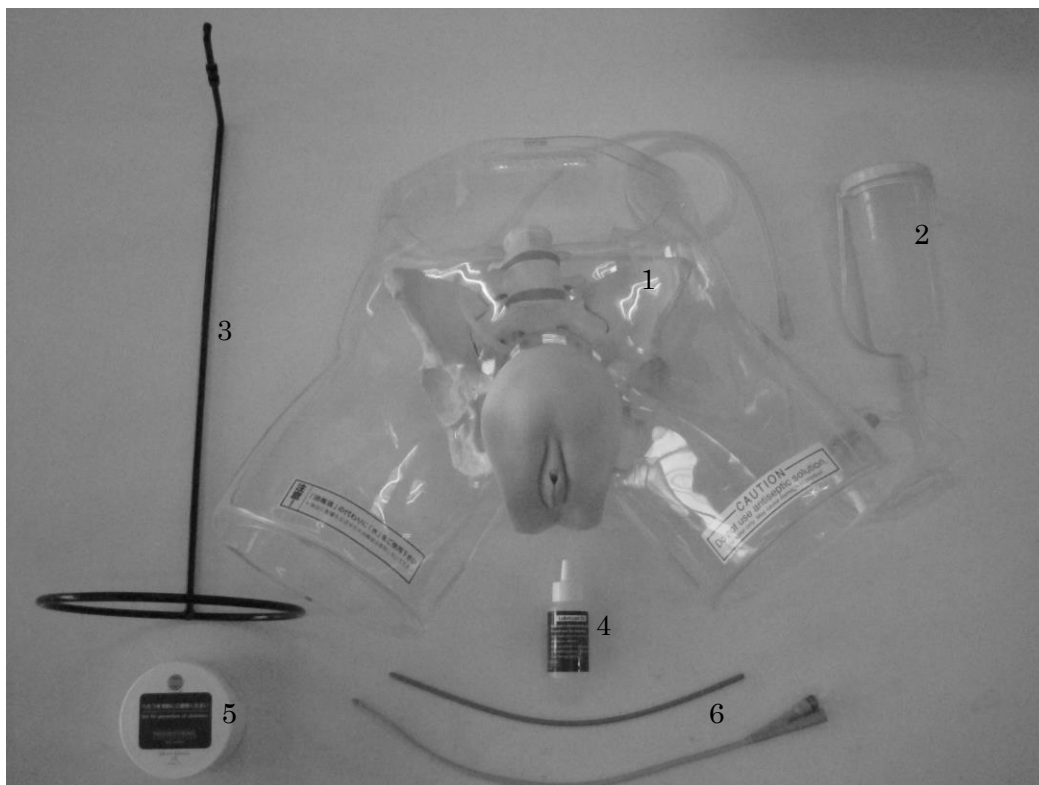

取扱上の注意

- 1 外性器に樹脂製品が長時間触れますと変形する恐れがありますので、ご使用には十分注意してください。
- 2 外性器の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋の着用をお勧めします。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 3 外性器の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いしないでください)
その後、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布してください。
- 4 実習の際は、イルリガートルボトルを尿道口より30cmくらい上の位置につるしてください。(専用のイルリガートルスタンドをご使用ください。)
イルリガートルボトルをあまり高い位置に吊ると、水漏れの原因となります。
また、膀胱内に水をためた後、イルリガートルボトル内に水を300CCメモリ以上の水を足さないでください。水漏れの原因となります。
- 5 外性器と膀胱は接着されておりますので、外性器から膀胱を外さないでください。
尚、外性器は本体(透明ボディ)とも接着されており外せません。また、膀胱にとりつけられている2本のチューブはとりはずさないようにしてください。
(故障の原因となります。)
- 6 本製品の透明部分は傷が付きやすくなっております。物に当てたり、強くこすったりすると破損や曇りの原因となりますのでご注意ください。
- 7 実習される際、挿入の前にカテーテルの水分を拭き取った後、付属の専用シリコンオイルを必ず塗布してご使用ください。
尚、潤滑剤は必ず、付属の専用シリコンオイルのみご使用ください。
(その他薬剤ご使用の場合、故障の原因となる恐れがあります。)
- 8 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 9 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 10 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

使用手順

導尿

- 1 本体を収納ケースから出し、滑りにくい机などに置いてください。
- 2 本体の赤色印のチューブとイルリガートルボトルをつないでください。(右図参照)
- 3 イルリガートルボトルをイルリガートルスタンドに設置して下さい。(くぼみにあわせてセットしてください。)
- 4 印無しのチューブをイルリガートルボトルの側面に掛けます。(右図参照)
- 5 クランプがしまっている事を確認し、イルリガートルボトルに水 500CC を入れて下さい。
- 6 クランプを開き、膀胱内に水を満たして下さい。
また、膀胱内に水をためた後、イルリガートルボトル内に水を 300CC メモリ以上の水を足さないでください。水漏れの原因となります。
- 7 挿入前に、ネラトンカテーテルの先端に専用の潤滑剤を塗布します。
(潤滑剤を塗布せずに挿入するとスムーズに挿入できないばかりか、尿道部分を傷つけることになり、また、挿入角度が間違っていると挿入できませんので、無理に押し込まないようにしてください。)
- 8 ネラトンカテーテルが膀胱内に到達すると、すぐに排水(排尿)されますのでトレイ等を準備しておき、カテーテルからの排水を受けてください。
(イルリガートルボトル内の水は順次補充してください。)
- 9 ネラトンカテーテルを抜き、実習を開始してください。


陰部洗浄

- 1 本体には、水を用いて実習してください。
水を使用した場合、べたついたりすべりが悪くなる事がございますが、品質上問題はございません。しかし、裂けやすい状態になりますので取り扱いには十分注意してください。
- 2 本体に薬剤等は使用しないで下さい。(故障の原因となる恐れがあります。)



保管方法

- 1 実習後、カテーテルを挿入した状態で、膀胱内の水を排出してください。
- 2 膀胱内に残った少量の水は、本体を傾けて透明チューブより排出してください。

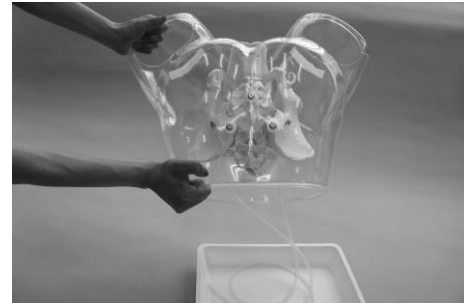

- 3 本体を十分に乾かした後、尿道口周辺にシリコンオイルを、性器の他の部分にはパウダーを塗布し保管してください。
- 4 外性器の汚れは、中性洗剤を用いてやわらかい布で軽くふき取り、その後、水を含ませた布でふき取ってください。
- 5 専用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温多湿な部屋を避けて保管してください。

株式会社坂本モデル



本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
	Tel 075-701-1135
	Fax 075-722-5638
	URL http://sakamoto-model.co.jp
	E-Mail info@sakamoto-model.com

大阪工場	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29
------	------------------------------