

M169 装着型摘便シミュレーター



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

ユーザーズマニュアル (151218)

－ I N D E X －

| | |
|------------|---|
| ●はじめに／もくじ | 1 |
| ●目的／内容 | 2 |
| ●取扱上の注意 | 3 |
| ●保管方法／使用手順 | 4 |

！
ご注意

商品到着時、すぐに本体と付属品を御確認頂き、不備、破損等ありましたら弊社または販売店まで御連絡頂けます様お願い申し上げます。

株式会社坂本モデル



こちらで動画をご覧くださいませ。→

M169

はじめに

この度は弊社商品 装着型摘便シミュレーターをご購入頂きまして誠に有難うございます。

商品を長く正しくお使い頂くために本ユーザーズマニュアルをよくお読みいただきご使用下さいます様お願い申し上げます。

尚、商品出荷時製品の点検は十分に行っておりますが、商品到着時すぐ開梱し、本体及び付属品の不足、破損箇所等が無いか点検して下さい。

もくじ

| | |
|-----------|---|
| はじめに／もくじ | 1 |
| 目的／内容 | 2 |
| 取扱上の注意 | 3 |
| 保管方法／使用手順 | 4 |

目的

下記項目の実習が可能

1 摘便実習

内容

- | | | |
|---|------------|----|
| 1 | 本体（土台＋肛門部） | 1台 |
| 2 | 装着用ベルト | 1本 |
| 3 | 専用潤滑剤 | 1本 |
| 4 | 模擬便 | 1個 |
| 5 | ベビーパウダー | 1缶 |



取扱上の注意

- 1 肛門部の材質上、汚れが付きやすいのでゴム手袋の着用をお薦めします。またボールペンやマジックなどの汚れは付着しますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 2 肛門部の軽い汚れは、中性洗剤を用いて洗うことができます。
(樹脂が溶けますのでシンナー等の溶剤を用いないでください)
その後、水分をよくふき取りベビーパウダーを塗布してください。
- 3 模擬便・潤滑剤は付属の物をご利用ください。
その他の物は素材を変質させる恐れがあります。
- 4 本体肛門部周辺は素材の性質上汚れが付きやすく、また、過度の摩擦がかかると破損します。必ずゴム手袋等をし、潤滑剤を十分塗布して実習してください。
- 5 使用中異常を見つけられたら、すぐに使用を中止し弊社または販売店までご連絡ください。
- 6 本製品は高度な訓練を実現させたシミュレーターですが、実際の処置での同様の効果を保証するものではありません。
- 7 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

保管方法

- 1 肛門部の汚れは中性洗剤を用いて汚れを取り、やわらかい布で水分をよくふき取り十分乾燥させた後、ベビーパウダーを塗布して保管してください。
- 2 専用ケースに入れ、直射日光が当たる場所や高温・多湿な部屋を避けて保管してください。

使用手順

- 1 専用ケースより本体を出して模擬便をセットしてください。
 - (1) 本体上部のキャップを外します。ロックを解除し、左右のくぼみをつまみ引き抜いてください。
 - (2) 模擬便を適度にとり本体内部に押し込むように挿入します。
 - (3) キャップを閉めます。その際キャップが本体の面とそろうようにしっかりと押し込んでから、ロックをしてください。
 - (4) 模擬便の硬度は水分含有量により変化します。適した硬度で実習を行ってください。
- 2 本体を装着してください。
(装着しての実習の際には、付属のベルトをしっかりと巻き本体を装着し実習を行ってください。)
- 3 人間が装着して実習を行う場合、まわりの方に十分注意して実習を行ってください。

株式会社坂本モデル



| | |
|----|---|
| 本社 | 〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 |
| | Tel 075-701-1135 |
| | Fax 075-722-5638 |
| | URL http://sakamoto-model.co.jp |
| | E-Mail info@sakamoto-model.com |

| | |
|------|------------------------------|
| 大阪工場 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-9-29 |
|------|------------------------------|